



MOTION
COMPOSITES



HELIO A6



HELIO A7



HELIO C2



HELIO kids



MOVE

MANUALE DI SERVIZIO

SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE LEGGERA

motioncomposites.com

MANUALE DI MANUTENZIONE E INFORMAZIONI DI GARANZIA

Commerciante: questo manuale deve essere consegnato all'utente della sedia a rotelle Motion Composites prima del primo utilizzo

Utente: prima di usare la sedia a rotelle Motion Composites, leggete attentamente questo manuale e conservatelo come referenza futura.

Per avere ulteriori informazioni su questo prodotto, le sue parti, i suoi accessori, e i servizi forniti, vi preghiamo di visitare il sito web: www.motioncomposites.com

SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES HELIO C2, A7, A6, VELOCE, XC2, MOVE, KIDS

Grazie per aver scelto Sedia a rotelle Motion Composites. Non esitate ad inviarci i vostri commenti e domande in merito all'affidabilità, alla sicurezza, e all'usabilità di questo prodotto, e in merito ai servizi di riparazione e manutenzione offerti dal vostro rivenditore autorizzato Motion Composites.

AVVERTENZA - LEGGETE QUESTO MANUALE

Non utilizzate questa sedia a rotelle senza leggere e comprendere questo manuale. Nel caso in cui non comprendete le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni, prima di utilizzare il prodotto vi preghiamo di contattare un rivenditore autorizzato Motion Composites o l'assistenza clienti ai numeri seguenti: 1-866-650-6555.

Se vengono ignorati gli avvertimenti, o la sedia a rotelle non viene controllata o mantenuta così come è indicato in questo manuale, si rischia di cadere, rovesciarsi o perdere il controllo, e quindi ferirsi seriamente e danneggiare sedia stessa.

Prodotto in Canada Con parti canadesi e parti importate.

CONTATTI

Motion Composites Inc.
160, Armand Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada

Telefono: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555

support@motioncomposites.com
motioncomposites.com



RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Advena Ltd
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar, BKR 4013, Malta

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Se avete domande riguardo la sicurezza, le regolazioni, gli accessori, l'uso o la manutenzione, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore autorizzato Motion Composites.

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni come referenza futura:

Data di acquisto: _____

Numero di serie: _____

Fornitore: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

IL SOFISTICATO INCONTRA LA CONVENIENZA

Abbiamo acquisito le conoscenze attraverso il processo di creazione dell'Helio C2 e l'abbiamo reso disponibile per ogni tipo di utente. Utilizzando le più recenti tecnologie di idroformatura e una lega di alluminio ad alte prestazioni, abbiamo realizzato una gamma completa di sedie a rotelle ultra-leggere e ad alta propulsione Motion Composites ad un prezzo accessibile.

LA SEDIA A ROTELLE PIÙ LEGGERA DELLA SUA CLASSE

Non abbiamo rivali quando si tratta di leggerezza, non importa quale materiale viene usato. Grazie al design all'avanguardia, insieme alle eccezionali proprietà dell'alluminio della serie 7000 e la fibra in carbonio sviluppata nella ricerca aerospaziale, una sedia a rotelle Motion Composites con una configurazione standard pesa almeno 2,2 kg in meno rispetto alle altre sedie della stessa categoria.

REGOLABILITÀ SENZA IL PESO

VELOCE è completamente regolabile per avere una taglia perfetta. Potete facilmente regolare l'altezza sedia-pavimento anteriore e posteriore, l'inclinazione, il centro di gravità e l'angolo del telaio. Tutte le opzioni offerte nella nostra linea di sedie a rotelle sono compatibili anche con VELOCE, per avere una personalizzazione perfetta.

L'ALTEZZA SEDIA-PAVIMENTO PIÙ BASSA POSSIBILE

L'innovativo design del telaio di Sedia a rotelle Motion Composites vi permette di ottenere un'altezza sedile-pavimento di soli 34 cm, con una rotella girevole di 10 cm su un telaio standard. Questo equivale a dire una struttura che può arrivare fino a 54 cm!

QUELLO CHE UNA SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE DOVREBBE VERAMENTE ESSERE

Ogni minimo dettaglio di Helio C2 è stato specificatamente ottimizzato per aiutarvi ad andare più lontano!

La nostra sedia vi permette di minimizzare il rischio a lungo termine di lesioni alle spalle e alle articolazioni, abbassando l'energia necessaria per spingerla. Sia che la spingete in avanti o la sollevate nel bagaglio della vostra macchina, Helio C2 vi donerà molta più libertà..

PERCORRETE PIÙ CHILOMETRI SULLA VOSTRA SEDIA

Avere una sedia a rotelle più facile da spingere è un vantaggio per tutti. Con una traversa idroformata perfettamente simmetrica, e i tubi ovali e gli assi di rotazione di grandi dimensioni, il nostro Ultrarigid Folding System (UFS) (Sistema Pieghievole Ultrarigido) massimizza la rigidità del telaio e la conservazione dell'energia durante il movimento.


AVVERTENZA - SELEZIONE DELLA SEDIA A ROTELLE

Motion Composites produce diversi modelli di sedie a rotelle per soddisfare le esigenze degli utenti. Tuttavia, l'azienda non è un consulente sanitario, e noi non possiamo essere a conoscenza delle particolari condizioni e necessità degli utenti. Per questo motivo, la selezione del modello, la sua regolazione, le opzioni e gli accessori dipendono esclusivamente dall'utente e dal consulente sanitario. La scelta della migliore sedia a rotelle e la vostra sicurezza personale dipendono dai seguenti criteri:

1. La vostra disabilità, forza, equilibrio e coordinazione;
2. I pericoli che dovete affrontare nelle vostre attività quotidiane (il posto in cui vivete, il lavoro, e i luoghi dove utilizzerete la sedia a rotelle); e
3. La vostra sicurezza e il vostro comfort personale (come i dispositivi anti-ribaltamento, le cinture di posizionamento o i sistemi di seduta). Se ignorate questo avvertimento, potrete mettere in pericolo la vostra salute.


ATTENZIONE - SISTEMA DI FISSAGGIO

Motion Composites riconosce che l'opzione di transito più sicura per un utente di sedia a rotelle è quella di trasferirlo in modo appropriato sul sedile del veicolo e utilizzare il sistema di ritenuta del veicolo a motore. Se si deve utilizzare un sistema di trasmissione a distanza, assicurarsi che la sedia a rotelle sia dotata del sistema di ancoraggio Motion Composites. Deve inoltre essere garantito che le cinghie, i ganci e i fermi del sistema di fissaggio del veicolo Paratransit soddisfino gli standard di sicurezza della provincia, dello stato o del paese in cui l'utente viene trasportato e installati secondo gli standard del produttore dei fermi.

Motion Composites non può raccomandare, e non consiglia, vincoli o produttori di sistemi di fissaggio.


AVVERTENZA - CINTURE

Il vostro rivenditore autorizzato e il vostro consulente sanitario devono stabilire se avete bisogno di sicure o sistemi di posizionamento, in modo da assicurare l'uso sicuro della sedia a rotelle. E' necessario ricordare che in caso di caduta potrebbero verificarsi ferite e lesioni gravi.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. I documenti più recenti, gli aggiornamenti e le ultime versioni di questo manuale sono disponibili sul sito web: www.motioncomposites.com.



T-700

CARBONIO T700 AD ALTO MODULO

Il materiale più leggero e più rigido disponibile, anche conosciuto per le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni.



ALU7005

CON ALLUMINIO 7005 T6

Una lega di alluminio nota per il suo alto rapporto resistenza-peso.



RUF

TELAIO RIGIDO UNIBODY

Un telaio unibody è molto più forte e ha bisogno di meno manutenzione rispetto a un telaio standard a due parti. Riduce anche il peso, mentre massimizza l'efficienza della propulsione.



SMC 3D

TRAVERSA IDROFORMATA SIMMETRICA

Traversa in alluminio tridimensionalmente simmetrica, per una torsione ridotta e una migliore distribuzione delle forze su tutto il telaio. (Tranne modello Move).



SMC 3D

OPZIONALE: KIT HD CON TRAVERSA RINFORZATA PER UNA CAPACITÀ DI PESO DI 159 KG

Le stesse proprietà del modello a traversa simmetrica modellata, con l'aggiunta della fibra di carbonio con una capacità di peso di 159 kg.



UFS

SISTEMA PIEGHEVOLE ULTRARIGIDO

Con assi di rotazione di grandi dimensioni e tolleranze estremamente precise per ottenere la più alta efficienza di propulsione.



FVA+

PIASTRA DELL'ASSE FORGIATO E VERTICALE

Offre la più precisa regolazione in tutto il settore. La montatura verticale massimizza la rigidità e la reattività.



ECH

MIGLIORE ALLOGGIO DELLE ROTELLE

Integrato all'interno del telaio per una maggiore durabilità, l'alloggiamento delle rotelle permette regolazioni facili e precise.



AFS

SISTEMA ANTI-URTO AFS

Riduce gli urti con la semplice rotazione di una vite. (Escluso il modello Veloce)



NEWTON

ACCESSORI NEWTON

L'intera gamma di accessori Newton sono progettati per essere leggeri e offrire migliori funzionalità.

CONTENTS

SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES

HELIO C2, A7, A6, VELOCE, XC2, MOVE, KIDS 3

AVVERTENZA – LEGGETE QUESTO MANUALE 3

CONTATTI 3

INFORMAZIONI IMPORTANTI! 3

1. PANORAMICA DEL PRODOTTO 7

2. PRIMA DELL'USO 8

2.1 AVVERTENZA SPECIALI 8

2.2 CONTROLLI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE 8

2.3 SICUREZZA DEI VEICOLI A MOTORE 8

2.4 ABITUARSI ALLA NUOVA SEDIA A ROTELLE 8

2.5 INDICAZIONI PER L'UTENTE 8

2.6 AVVISO IMPORTANTE QUANDO SI UTILIZZA LA MANIGLIA DELLA CARROZZINA E LE MANIGLIE DI SPINTA 8

2.7 NOTA PER IL RIVENDITORE AUTORIZZATO E PER IL TECNICO QUALIFICATO 8

2.8 SIMBOLI 9

3. TUTORIAL 9

4. SPECIFICHE TECNICHE 9

4.1 INDIETRO TAPPEZZERIA 9

4.2 CUSCINO 9

4.3 IMBOTTITURA BRACCIOLO 9

4.4 POSIZIONE ETICHETTA 10

5. SICUREZZA 12

5.1 LISTA DI CONTROLLI PERIODICI 12

5.2 LIMITI DI PESO 12

5.3 ALLENAMENTO CON I PESI E ATTIVITÀ SPORTIVE 12

6. IN SELLA ALLA VOSTRA SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES 12

6.1 RIDURRE IL RISCHIO D'INCIDENTE 12

6.2 CONDIZIONI AMBIENTALI 12

6.3 ASSISTENTI 12

6.4 IN SELLA ALLA VOSTRA SEDIA A ROTELLE 12

6.4.1 PER RIDURRE IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO, DOVETE SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI: 12

6.4.2 PUNTO DI BILANCIAMENTO 13

6.4.3 IMPENNATA 13

6.4.4 TRASFERIMENTO 13

6.4.5 VESTIRSI 13

6.4.6 ALLUNGARSI/APPOGGIARSI/PIEGARSI 13

6.4.7 SPOSTARSI ALL'INDIETRO 13

6.4.8 RAMPE, SALITE E PENDII 14

6.4.9 OSTACOLI 14

6.4.10 CORDOLI E SCALINI 14

6.5 MUOVERSI CON L'AIUTO DI UN ASSISTENTE 14

6.5.1 SALIRE UN CORDOLO O UNO SCALINO 14

6.5.2 SCENDERE UN CORDOLO O UNO SCALINO 14

6.5.3 SCALE 15

6.5.4 SALIRE UNA RAMPA DI SCALE 15

6.5.5 SCENDERE UNA RAMPA DI SCALE 15

6.5.6 SCALE MOBILI 15

7. COME UTILIZZARE LA SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES 16

7.1 CHIUDERE E APRIRE LA SEDIA A ROTELLE 16

7.1.1 CHIUDERE LA SEDIA A ROTELLE 16

7.1.2 APRIRE LA SEDIA A ROTELLE 16

7.2 FRENI 16

7.3 ALBERATURE ANTERIORI 16

7.3.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE 16

7.4 POGGIAPIEDI 16

7.4.1 PEDANA AD ELEVAZIONE (NON DISPONIBILE SU VELOCE) 16

7.4.1.1 INSTALLAZIONE DELLA PEDANA AD ELEVAZIONE 16

7.4.1.2 REGOLAZIONE DELLA PEDANA AD ELEVAZIONE 17

7.5 BRACCIOLI 17

7.5.1 BRACCIOLI FLIP-BACK 17

7.5.2 BRACCIOLI A T RIMOVIBILI 17

7.5.3 BRACCIOLI OSCILLANTI 17

7.6 CINTURE DI POSIZIONAMENTO 17

7.6.1 CINTURE DI POSIZIONAMENTO CON FIBBIA PER AUTOMOBILE E PER AERO 17

7.6.2 CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON VELCRO™ 17

7.7 ANTIRIBALTAMENTO 18

7.7.1 ANTIRIBALTAMENTO 18

7.7.2 DISPOSITIVI ANTI-RIBALTAMENTO RIPIEGABILI 18

7.7.3 LEVA ANTIRIBALTAMENTO 18

7.8 RUOTE POSTERIORI 18

7.8.1 ASSI A SGANCIO RAPIDO 18

7.8.2 ASSI FISSI 18

7.8.3 SISTEMA DI GUIDA A UN SOLO BRACCIO 19

7.9 IMBRACATURE DI SICUREZZA 19

7.10 MANICI PER SPINGERE 19

7.10.1 MANIGLIE DI SPINTA RIBALTABILI 19

7.10.2 REGOLAZIONE DELLE MANIGLIE DI SPINTA AD ALTEZZA REGOLABILE 19

8. REGOLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VOSTRA SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES 19

8.1 SERVIZI 19

8.2 PARTI DI RICAMBIO 19

8.3 ATTREZZI NECESSARI 20

8.4 MANUTENZIONE GENERALE 20

8.4.1 PRESSIONE DELLE RUOTE 20

8.4.2 PUNTURA 20

8.4.3 PULIZIA DELLA SEDIA A ROTELLE 20

8.4.4 CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLA SEDIA A ROTELLE 20

8.5 SCHIENALE 20

8.5.1 RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLE CANNE POSTERIORI 20

8.5.2 OPZIONE REGOLABILE IN PROFONDITÀ 20

8.5.3	REGOLAZIONE DELL'ANGOLO POSTERIORE	20	8.10.7	MOVE TELAIO DELLA RUOTA	26
8.5.4	RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLA CINTURA DI POSIZIONAMENTO.....	21	8.10.8	VELOCE REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELL'ALLOGGIAMENTO DELLE ROTELLE	26
8.5.5	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLO SCHIENALE.....	21	8.11	RUOTE POSTERIORI	26
8.5.6	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLO SCHIENALE (MANIGLIA A SPINTA INTEGRATA)	21	8.11.1	REGOLAZIONE GLI ASSI A SGANCIO RAPIDO.....	26
8.5.7	INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA FODERA	21	8.11.2	SOSTITUZIONE/REGOLAZIONE ANELLI CORRIMANO	26
8.5.8	INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA FODERA (MANIGLIA A SPINTA INTEGRATA).....	21	8.11.3	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ASSE POSTERIORE	26
8.5.9	INSTALLAZIONE / RIMOZIONE TENSIONE REGOLABILE POSTERIORE TAPPEZZERIA.....	21	8.11.4	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ASSE POSTERIORE (MOVE, A6)	26
8.6	BRACCIOLO	22	8.11.5	REGOLAZIONE SPAZIATURA RUOTE POSTERIORI.....	27
8.6.1	INSTALLAZIONE DEI BRACCIOLI FLIP BACK.....	22	8.11.6	SOSTITUZIONE DELLA CAMPANATURA POSTERIORE	27
8.6.2	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEI BRACCIOLI FLIP-BACK E DEI BRACCIOLI A T.....	22	8.11.7	REGOLAZIONE DELLA CONVERGENZA/DIVERGENZA CON LA CAMPANATURA DELLE RUOTE POSTERIORI	27
8.6.3	INSTALLAZIONE DEI BRACCIOLI RIMOVIBILI A T E DELLA PROTEZIONE RIGIDA LATERALE	22	8.12	FRENI	28
8.6.4	INSTALLAZIONE DEI MORSETTI DI PROTEZIONE O PER I VESTITI	22	8.12.1	SOSTITUZIONE/REGOLAZIONE DEI FRENI.....	28
8.6.5	SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DEL BRACCIOLO.....	22	8.13	ESTENSIONI DEI FRENI.....	28
8.6.6	INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE DEI BRACCIOLI OSCILLANTI	23	8.13.1	SOSTITUZIONE/REGOLAZIONE DELLE ESTENSIONI DEI FRENI	28
8.6.7	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA BRACCIOLI OSCILLANTI	23	8.14	ANTI-RIBALTAMENTO.....	28
8.7	LUNGHEZZA DEL POGGIAPIEDI/ANGOLAZIONE DELLA PEDANA	23	8.14.1	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO	28
8.7.1	REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL POGGIAPIEDI.....	23	8.14.2	LEVA AUSILIARIA	28
8.7.2	REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL POGGIAPIEDI (TIPO SCORREVOLE).....	23	8.15	KIT E SUPPORTO POGGIATESTA.....	28
8.7.3	REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL POGGIAPIEDI (TIPO SINGOLA PEDANA)	23	8.15.1	INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO POGGIATESTA	28
8.7.4	REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLA PEDANA	23	8.15.2	INSTALLAZIONE DEL KIT POGGIATESTA.....	29
8.7.5	INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DEL SUPPORTO PER ARTI.....	23	8.16	PIASTRA ASSE PER AMPUTATO	29
8.7.6	PULIZIA DEL SUPPORTO PER ARTI	24	8.16.1	INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA A SSE PER AMPUTATO	29
8.8	SEDILE	24	8.16.2	PIASTRA ASSE PER AMPUTATO MOVE/A6	29
8.8.1	SOSTITUZIONE DELLA FODERA	24	8.17	USO DEL SERVIZIO TRASPORTO PER DISABILI	29
8.9	ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO	24	11. GARANZIA LIMITATA MOTION COMPOSITES.....	30	
8.9.1	MODIFICAZIONE DELL'ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO ANTERIORE.....	24	10. DANNI PARTICOLARI	30	
8.9.2	MODIFICAZIONE ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO POSTERIORE	24	10.1	I DANNI CHE RICIEDONO UN SERVIZIO DA UN AGENTE QUALIFICATO	30
8.9.3	MODIFICARE L'ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO ANTERIORE.....	24	10.2	DANNI SPECIALI CHE RICHIEDONO IL RITORNO DELLA SEDIA AL PRODUTTORE	30
8.10	GRUPPI ROTELLE ANTERIORI, FORCELLE E STELO FORCELLE	24	10.3	PROCEDURA DI RIPARAZIONE	30
8.10.1	RIMOZIONE/INSTALLAZIONE/ RIPOSIZIONAMENTO DELLE ROTELLE ANTERIORI.....	24	10.4	ATTREZZI.....	30
8.10.2	RIMOZIONE/INSTALLAZIONE/ RIPOSIZIONAMENTO DELLE ROTELLE ANTERIORI (VELOCE).....	24	11. MANUTENZIONE E LISTA CONTROLLI DI SICUREZZA.....	31	
8.10.3	RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO DELLE ROTELLE	25	12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.....	31	
8.10.4	VELOCE TELAIO DELLA RUOTA	25	WC-19- SISTEMA DI SICUREZZA TRANSIT TIE-DOWN	32	
8.10.5	RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DADO DELLO STELO (TRANNE VELOCE)	25			
8.10.6	REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELL'ALLOGGIAMENTO DELLE ROTELLE.....	25			


1. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Lista delle parti


1. Maniglia per spingere
2. Tubo schienale
3. Cuscinetto bracciolo
4. Ruota posteriore
5. Perno bracciolo
6. Alberatura anteriore
7. Pedana*
8. Rotella*
9. Forcina
10. Alloggiamento rotella
11. Freno
12. Traversa
13. Piastra di montaggio ruota posteriore
14. Guida sedile
15. Bracciolo*
16. Dispositivo anti-ribaltamento

* Potrebbe essere differente, secondo la configurazione dell'ordine


VELOCE

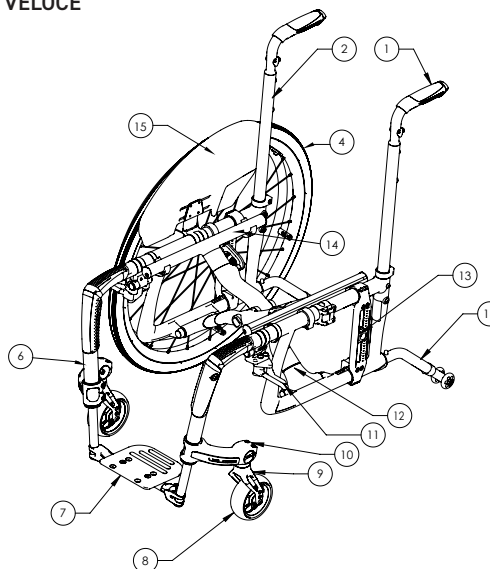


HELIO A7, C2, KIDS, XC2, HELIO

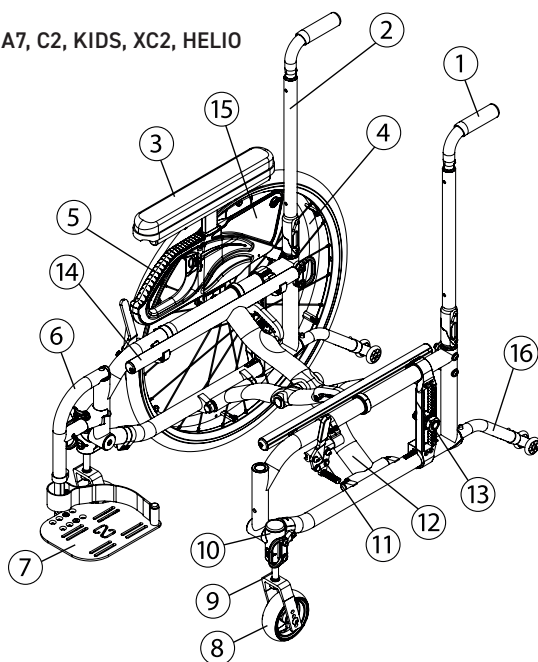

MOVE

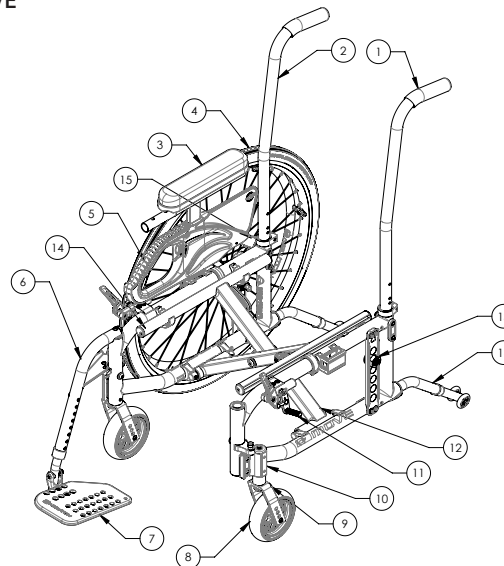

HELIO A6

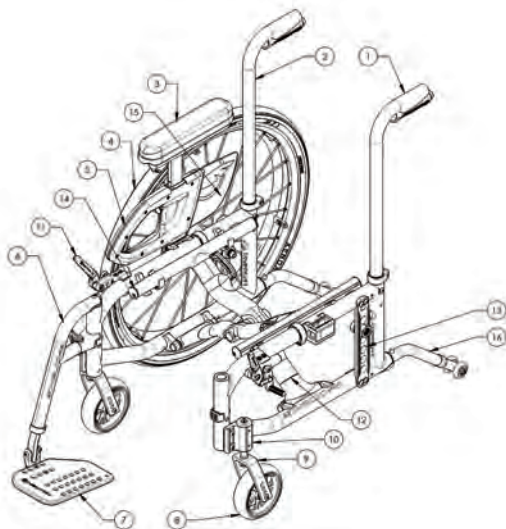

2. PRIMA DELL'USO

2.1 AVVERTENZA SPECIALI



AVVERTENZA

Sedia a rotelle Motion Composites è stata progettata con le ultime tecnologie a fibra di carbonio (alluminio).
NON CERCATE DI MODIFICARE IL TELAIO IN NESSUN MODO. QUESTO POTREBBE ESSERE GRAVEMENTE DANNEGGIATO IN CASO FORATURA O RETTIFICA, INVALIDANDO LA GARANZIA. Usare solo morsetti e accessori approvati e progettati da Motion Composites sulla vostra Sedia a rotelle Motion Composites.

- Non usare la sedia quando si è sotto l'influenza dell'alcol, di certe medicine o di droghe. Questo potrebbe compromettere l'abilità di guidare la sedia. Si prega di consultare un medico prima di usare il farmaco.
- Questa sedia a rotelle non è indicata per persone con problemi visivi.
- L'utente deve essere mentalmente e fisicamente idoneo per guidare questa sedia a rotelle.



AVVERTENZA

Temperature estreme

Il rischio di ipotermia o bruciature sulle parti sedia a rotelle. Alcune parti della sedia a rotelle possono diventare estremamente caldi o freddi a causa di temperature estreme. Non esporre il prodotto a tutte le temperature estreme (ad esempio la luce solare diretta, sauna, freddo estremo) al fine di prevenire le lesioni attraverso il contatto con alcune parti della sedia a rotelle.

Condizioni ambientali

Non esporre la sedia a rotelle a temperature inferiori a -20°C o superiori a 40°C.

2.2 CONTROLLI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

È importante mantenere la vostra sedia a rotelle in buone condizioni operative.

1. Controllare e mantenere la sedia a rotelle sempre secondo le istruzioni e le tabelle indicate nel capitolo *8.4 Manutenzione Generale* e nel capitolo *11. Lista Controlli di Sicurezza*.
2. Se individuate un problema nel corso della vostra ispezione o manutenzione, fate sempre riparare la sedia prima di riutilizzarla di nuovo.
3. Fate sempre ispezionare la vostra sedia da un tecnico certificato e autorizzato da Motion Composites almeno una volta l'anno.
4. Eseguite sempre i controlli di sicurezza, la manutenzione e la regolazione quando la sedia non è occupata (a meno che non espressamente specificato).

La mancata ispezione o manutenzione della sedia a rotelle nelle modalità descritte in questo manuale potrebbe causare caduta, ribaltamento o perdita di controllo della sedia a rotelle e gravi lesioni all'utente e ad altri o danni alla sedia a rotelle.

2.3 SICUREZZA DEI VEICOLI A MOTORE



AVVERTENZA

Identificare se la sedia è stata fabbricata con la relativa opzione di trasporto installata.

Se la sedia non è equipaggiata con l'Opzione di Trasporto: Le sedie a rotelle di Motion Composites non sono progettate per essere usate in un veicolo a motore, e in quanto non soddisfano gli standard stradali federali.

Non sedetevi mai nella sedia quando vi trovate in un veicolo (autobus, automobile, furgone, camion, barba, treno, ecc.). In caso di incidente o arresto improvviso, una cintura di posizionamento della sedia a rotelle NON previene eventuali infortuni e può, in effetti, causare lesioni.

Trasferitevi sempre in un sedile omologato quando il veicolo comincia a muoversi.

Assicuratevi al sedile omologato usando le sicure appropriate (le cinture in un veicolo a motore, le cinture addominali in un aereo, ecc.).

Non portate mai la vostra sedia nel sedile anteriore del veicolo, in quanto i suoi movimenti potrebbero far scivolare la sedia e interferire con la capacità del conducente di guidare e controllare il veicolo stesso. Quando trasportate la sedia in un veicolo, assicuratevela sempre in modo che non possa rotolare o spostarsi. Stiparla nel portabagagli è sempre l'alternativa di trasporto più sicura.

Non usare mai una sedia che è stata coinvolta in un incidente automobilistico, in quanto questa potrebbe essere stata danneggiata in un modo non immediatamente evidente ma che potrebbe comunque impedire il suo uso corretto. Se non seguite questi avvertimenti, rischiate di cadere, rovesciarvi, perdere il controllo, ferirvi seriamente, o danneggiare la sedia stessa.



AVVERTENZA

Sedia a rotelle Motion Composites è disponibile anche con l'opzione WC-19 Transit Tie-Down. Questa è un'alternativa offerta solo come opzione installata in fabbrica. Vi preghiamo di leggere il Manuale Transit Tie-Down per usare quest'opzione in modo sicuro.

2.4 ABITUARSI ALLA NUOVA SEDIA A ROTELLE.



AVVERTENZA

Ogni sedia a rotella è un pezzo unico di attrezzatura medica. Sia se siete dei nuovi utenti sia avete molti anni di esperienza, dovete dedicare un po' di tempo per abituarvi alla nuova sedia prima di incominciare ad usarla. Iniziate lentamente, e prendete tutto il tempo necessario per imparare a gestirla, manovrarla, e guidarla in modo opportuno.

2.5 INDICAZIONI PER L'UTENTE

La sedia a rotelle Motion Composites è un dispositivo a funzionamento manuale destinato a essere utilizzato come mezzo di mobilità per le persone che possono muoversi solo in posizione di seduta. Non è progettato per l'ambito pediatrico fatta eccezione per gli Helio Kids.

Leggere attentamente le istruzioni in questo manuale prima di utilizzare o riparare la carrozzina. In caso di domande o difficoltà di comprensione delle seguenti istruzioni, contattare un tecnico qualificato; è possibile anche contattare un tecnico Motion Composites per telefono o via email (vedi le informazioni di contatto nella pagina precedente).

La sedia a rotelle HELIO per bambini è un dispositivo a funzionamento manuale destinato a essere utilizzato come mezzo di mobilità per le persone che possono muoversi solo sedute anche in ambito pediatrico).

La sedia a rotelle Helio Kids è un dispositivo ad azionamento manuale destinato ad essere utilizzato come mezzo di mobilità per una popolazione pediatrica

2.6 AVVISO IMPORTANTE QUANDO SI UTILIZZA LA MANIGLIA DELLA CARROZZINA E LE MANIGLIE DI SPINTA.



AVVERTENZA

Il manico non è progettato per sollevare o tirare l'utente nella sedia a rotelle, ma solo per spingerlo o guidarlo.

Limite di peso: 265 lb (120kg)


Se sollevate o tirate l'utente ancora nella sedia, potreste danneggiare la maniglia e causare serie ferite.

2.7 NOTA PER IL RIVENDITORE AUTORIZZATO E PER IL TECNICO QUALIFICATO

Leggere attentamente questo manuale prima di riparare o regolare la sedia a rotelle. Se avete domande o difficoltà nel comprendere le istruzioni, vi preghiamo di contattare un tecnico qualificato; potrete anche contattare un tecnico Motion Composites per telefono o via email (vedete i contatti nella pagina precedente).

2.8 SIMBOLI


I simboli seguenti sono usati in questo manuale. Vi preghiamo di familiarizzare con il loro significato.


 Il simbolo di avvertimento indica un'informazione importante per prevenire ferite e danni.

 Informazioni utili per l'utente.

ALTRI AVVISI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

 L'impostazione iniziale della vostra Sedia a rotelle Motion Composites deve essere fatta da un tecnico qualificato.

 La manutenzione regolare estende la durata della sedia. Portarla da un tecnico qualificato ogni anno per farla ispezionare e riparare.

 Non utilizzare strumenti elettrici o ad aria. Il serraggio deve essere fatto manualmente.

L'ultima versione del manuale può essere trovata nel nostro website su www.motioncomposites.com.

3. TUTORIAL

Per trovare gli ultimi tutorial e le necessarie informazioni, o per contattare il nostro team, vi preghiamo di visitare la pagina web: www.motioncomposites.com

4. SPECIFICHE TECNICHE

4.1 INDIETRO TAPPEZZERIA



Tutta la tappezzeria sono realizzati con materiale impermeabile che può essere pulito.

Le cuciture non sono impermeabili.

Lo schienale tensione rivestimento regolabile è fatta solo di materiale impermeabile.

Active-Mesh o Syntech Suede, trovato su slip-on o semi-tensione tappezzeria schienale regolabile, in grado di assorbire l'umidità.



- Materiale di imbottitura: schiuma
- Spessore: 10 mm
- Durezza a compressione: 0,231-0,258 kPa
- Densità della schiuma: 32,0 - 33,6 kg / m³
- Materiale di copertura: poliestere e nylon antimicrobici e antimicotici, Cal-117 resistente alla fiamma

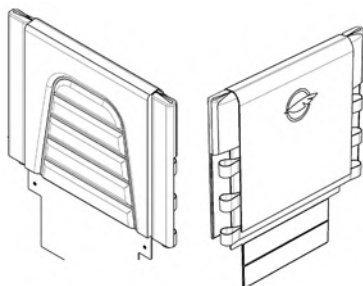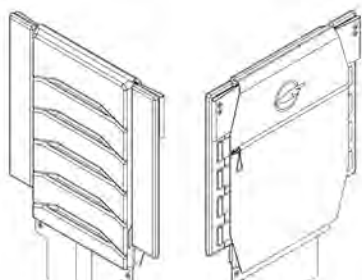

4.2 CUSCINO

Tutti i cuscini sono realizzati in materiale impermeabile che può essere pulito.


- Le cuciture non sono impermeabili.
- Imbottitura: schiuma
- Spessore: 2" o 3" / 51 o 76 mm
- Durezza a compressione: 0,245 - 0,289 kPa
- Densità della schiuma: 43,2-46,5 kg / m³
- Materiale di copertura: poliuretano antimicrobico e antimicotico, resistente al fuoco Cal-117

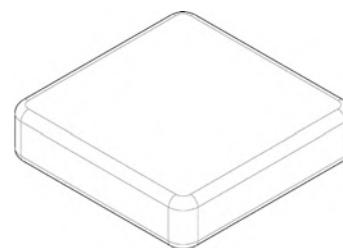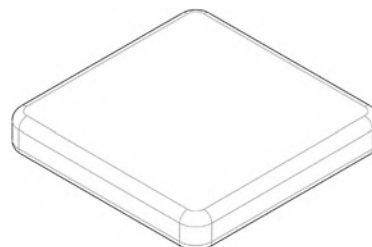

4.3 IMBOTTITURA BRACCIOLO

Il bracciolo è realizzato in materiale impermeabile che può essere pulito.


- Imbottitura: schiuma
- Spessore: 26 mm
- Durezza a compressione: 0,95 - 0,510 kPa
- Densità della schiuma: 69,2 - 71,5 kg / m³
- Materiale di copertura: vinile

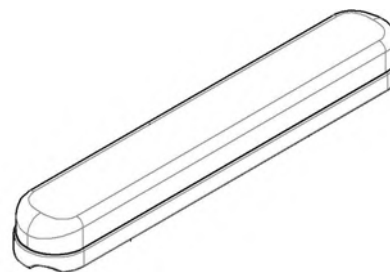

4.4 POSIZIONE ETICHETTA

1. Posizione sul telaio
2. Produttore Logo
3. Nome del produttore e indirizzo
4. Nome del dispositivo
5. Anno di produzione
6. Descrizione del prodotto
7. Paese d'origine
8. Limite di peso
9. Numero di serie e codice a barre
10. CE standard
11. Leggere il manuale prima dell'uso
12. Anit-ribaltabili etichetta
13. WC-19 norma

Non rimuovete e non modificate le etichette sulla sedia a rotelle. Se un'etichetta viene danneggiata, sostituirla con un'altra.

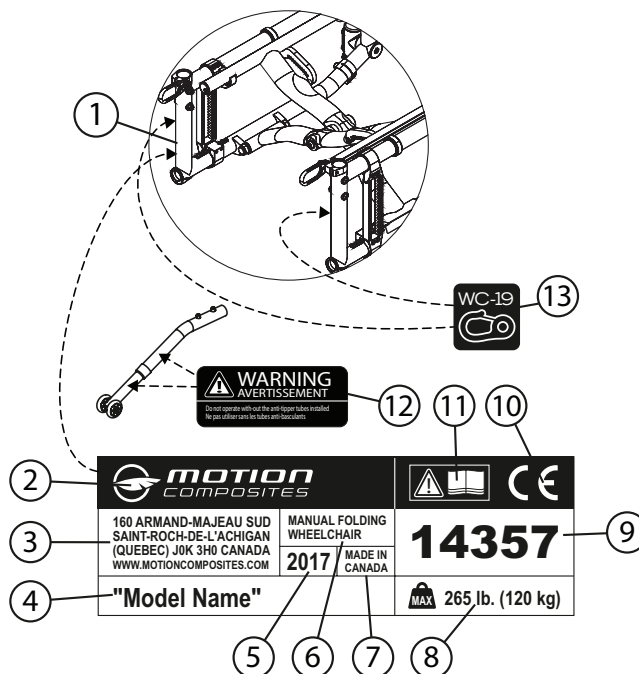

4.5 STRUTTURA

MODELLO	STRUTTURA	MATERIALE	PESO DI TRASPORTO*	LICHTSTE CONFIGURATIE**	CAPACITÀ STD	CAPACITÀ HD
VELOCE	• Modellato • Pieghevole	• T700 Fibra di carbonio alto modulo	5,4 kg (12 lb) poggiatesta incluso	8,8 kg (19,5lb)	120 kg (265 lb)	159 kg (350 lb)
HELIO C2	• Modellato • Pieghevole	• T700 Fibra di carbonio alto modulo	4,3 kg (9,5 lb)	8,8 kg (19,3 lb)	120 kg (265 lb)	159 kg (350 lb)
HELIO KIDS	• Modellato • Pieghevole	• T700 Fibra di carbonio alto modulo	4,8 kg (10,6 lb)	9,4 kg (20,8 lb)	79 kg (175 lb)	159 kg (350 lb)
HELIO XC2	• Modellato • Pieghevole	• 7005 Alluminio • T700 crossbrace in fibra di carbonio	5,6 kg (12,4 lb)	10,1 kg (22,2 lb)	120 kg (265 lb)	159 kg (350 lb)
HELIO A7	• Idroformato • Pieghevole	• 7005 alluminio	6,2 kg (13,6 lb)	10,6 kg (23,5 lb)	120 kg (265 lb)	159 kg (350 lb)
HELIO A6	• Idroformato • Pieghevole	• 6061 alluminio	6,0 kg (13,1 lb)	10,4 kg (22,9 lb)	120 kg (265 lb)	159 kg (350 lb)
MOVE	• Estruso • Pieghevole	• 6061 alluminio	6,4 kg (14,0 lb)	10,9 kg (24,0 lb)	120 kg (265 lb)	159 kg (350 lb)

* Senza ruote posteriori, cuscino, poggiatesta, bracciolo e blocco ruota.

** Con bloccaggi Newton, poggiatesta 80°, pedane in materiale composito, ruote posteriori Newton Gravity, Cuscino, anti-ribaltamento e braccioli/protezioni laterali non inclusi.

4.6 DIMENSIONE

MODELLO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA DEL SEDIRLE ANTERIORE	ALTEZZA DEL SEDILE POSTERIORE
VELOCE	35,7 cm a 50,8 cm 14" a 20"	35,7 cm a 50,8 cm 14" a 20 po	35,6 cm a 53,3 cm 14" a 21"	34,3 cm a 51,4 cm 13½" a 20¼"
HELIO C2	35,7 cm a 55,9 cm 14" a 22"	35,7 cm a 50,8 cm 14" a 20 po	33 cm a 54,6 cm 13" a 21½"	34,3 cm a 51,4 cm 13½" a 20¼"
HELIO KIDS	30,5 cm a 40,6 cm 12" a 16"	30,5 cm a 48,3 cm 12" a 19 po	33 cm a 54,6 cm 13" a 21½"	31,8 cm a 48,9 cm 12½" a 19¼"
HELIO XC2	35,7 cm a 55,9 cm 14" a 22"	35,7 cm a 50,8 cm 14" a 20 po	33 cm a 54,6 cm 13" a 21½"	31,8 cm a 48,9 cm 12½" a 19¼"
HELIO A7	35,7 cm a 55,9 cm 14" a 22"	35,7 cm a 50,8 cm 14" a 20 po	33 cm a 54,6 cm 13" a 21½"	31,8 cm a 51,4 cm 12½" a 20¼"
HELIO A6	35,7 cm a 55,9 cm 14" a 22"	35,7 cm a 50,8 cm 14" a 20 po	30,5 cm a 52,1 cm 12" a 20½"	30,5 cm a 51,4 cm 12" a 20¼"
MOVE	35,7 cm, 40,6 cm, 45,7 cm, 50,8 cm e 55,9 cm 14", 16", 18" 20" e 22"	40,6 cm, 45,7 cm e 50,8 cm 16", 18" e 20"	31,8 cm a 52,1 cm 12½" a 20¼"	31,1 cm a 50,8 cm 12¼" a 20"

4.7 REGOLABILITÀ

MODELLO	RIVESTIMENTO	ALTEZZA POSTERIORE	ANGOLO REGOLABILE	POGGIAPIEDI	CAMPANATURA	BARICENTRO
VELOCE	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	22,9 cm a 53,3 cm 9" a 21"	85° a 110°	Un solo pezzo	0°, 3°, 6°	2,5 cm a 10,2 cm 1" a 4"
HELIO C2	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	22,9 cm a 53,3 cm 9" a 21"	85° a 110°	Oscillazione/Apertura	0°, 3°, 6°	2,5 cm a 10,2 cm 1" a 4" + piastra assiale per gli amputati
HELIO KIDS	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	22,9 cm a 53,3 cm 9" a 21"	90° a 105°	Oscillazione/Apertura	0°, 3°, 6°	2,5 cm a 10,2 cm 1" a 4" + piastra assiale per gli amputati
HELIO XC2	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	22,9 cm a 53,3 cm 9" a 21"	70° a 110°	Oscillazione/Apertura	0°, 3°, 6°	2,5 cm a 11,3 cm 1" a 4½" + piastra assiale per gli amputati
HELIO A7	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	22,9 cm a 53,3 cm 9" a 21"	85° a 110°	Oscillazione/Apertura	0°, 3°, 6°	2,5 cm a 9,5 cm 1" a 3¾" + piastra assiale per gli amputati
HELIO A6	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	22,9 cm a 53,3 cm 9" a 21"	85° a 110°	Oscillazione/Apertura	0°, 3°, 6°	2 cm a 7 cm 0,75" a 2¾" + piastra assiale per gli amputati
MOVE	• Tensione regolabile, slide-on oppure bolt-on	40,6 cm, 45,7 cm e 50,8 cm 16", 18" e 20"	90° a 110°	Apertura	0°	2 cm a 5,1 cm 0,75" a 2" + piastra assiale per gli amputati

5. SICUREZZA

5.1 LISTA DI CONTROLLI PERIODICI

Vedere la relativa appendice (*sezione 11*)

5.2 LIMITI DI PESO

- La sedia a rotelle Motion Composites ha un peso limite di 265 lb (120 kg) e il modello HD (alta capacità) è di 350 lb (159 kg) con il kit HD. La capacità di peso specificata include: il conducente e qualsiasi bagaglio. Ad esempio, un utente su una sedia a rotelle standard, 120 kg (265 lb), con uno zaino da 10 libbre (5 kg), non deve superare un peso di 255 libbre (115 kg). È della massima importanza che il peso totale sia inferiore alla capacità specificata sopra.
- Helio Kids ha un limite di peso di 175 libbre (79 kg).
- La sedia a rotelle è progettata per supportare una sola persona. Per favore non alzarsi sui poggiatesta.
- Motion Composites non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati dall'uso improprio di questa sedia a rotelle.

5.3 ALLENAMENTO CON I PESI E ATTIVITÀ SPORTIVE

- Questa sedia a rotelle non è stata progettata o testata per eseguire un allenamento con i pesi o come apparato per lo stretching. Non cercate di usare la sedia per questo tipo di attività, poiché la garanzia decade.
- Questa sedia a rotelle non è destinata a essere utilizzata in attività sportive.



AVVERTENZA

In caso di modifiche, riparazioni o qualsiasi altro tipo d'intervento, assicuratevi che le sicure siano fissate bene prima dell'uso.



AVVERTENZA

Il superamento del limite di peso indicato potrebbe causare gravi danni alla sedia a rotelle e gravi infortuni all'utente.



AVVERTENZA

Questa sedia a rotelle è stata progettata per adattarsi alle dimensioni del proprietario, e come tale deve essere usata solo da quest'ultimo, a meno che non sia riadattata da uno specialista qualificato approvato da Motion Composites.

6. IN SELLA ALLA VOSTRA SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES



AVVERTENZA

Le regolazioni della vostra sedia a rotelle (altezza, profondità, sistema, angolo posteriore, campanatura/taglia/posizione delle ruote posteriori e anteriori, posizione dei poggiatesta) potrebbero influenzare il centro di gravità. Per questo motivo, le regolazioni devono essere eseguite solo da un professionista, e l'utente deve essere consapevole che queste possono influenzare la stabilità della sedia.



AVVERTENZA

Non inclinate la sedia e non eseguite un'impennata senza assistenza.



AVVERTENZE

Non state in piedi sulla sedia o su una parte del telaio.

Non sedetevi sulla sedia a meno che questa non sia completamente aperta e le rotaie del telaio della sedia non siano completamente inserite nei loro alloggi.

Non usate la pedana come piattaforma quando vi sedete o vi alzate o quando vi allungate per prendere un oggetto.

6.1 RIDURRE IL RISCHIO D'INCIDENTE

- Vi raccomandiamo di revisionare l'uso sicuro della sedia con il vostro medico prima di usarla.
- Prendete tutto il tempo necessario per leggere attentamente le istruzioni indicate in questo manuale, così che possiate stare a vostro agio quando usate la sedia senza assistenza. Siate sempre consapevoli dei possibili pericoli.
- Il dispositivo anti-ribaltamento deve essere usato in qualsiasi momento.
- Dato che i dispositivi anti-ribaltamento sono un'opzione in alcuni mercati, Motion Composites raccomanda vivamente di ordinarne uno, poiché questi sono un importante elemento di protezione per l'utente. Usate sempre un dispositivo anti-ribaltamento.
 - a. Usare sempre antiribaltamento se non sei un pilota esperto.
 - b. Usare sempre antiribaltamento ogni volta che si modifica o regola la sedia a rotelle. Qualsiasi modifica può rendere più facile il ribaltamento all'indietro.
 - c. Utilizzare antiribaltamento fino a adattarsi al cambiamento, e sono surethat di non si è a rischio di ribaltarsi.

6.2 CONDIZIONI AMBIENTALI

- Sedia a rotelle Motion Composites è stata progettata per essere usata su superfici dure e piane, come asfalto, cemento, o la pavimentazione e la moquette esterna.
- Non usate la sedia su strade o autostrade.
- Siate consapevoli che la manovrabilità della sedia è influenzata significativamente da diverse condizioni esterne come sabbia, fango, neve e superfici ruvide. Se usate la vostra sedia in queste condizioni, vi raccomandiamo di farla controllare frequentemente.
- State attenti quando usate la sedia su superfici bagnate o scivolose. L'esposizione all'acqua o all'eccessiva umidità a lungo termine può danneggiare la sedia o perfino corroderla.
- Non lasciate la vostra sedia a rotelle in ambienti umidi come bagni (per esempio quando fate una doccia). Conservarla in un posto asciutto e fresco, lontano dall'esposizione diretta ai raggi solari. Se la sedia è bagnata, asciugate tutte le parti con un panno prima di posarla.
- Non usate la sedia sotto la doccia, nelle piscine, o in altre situazioni in cui è presente l'acqua.

6.3 ASSISTENTI

- Non usate mai le parti rimovibili (come braccioli e poggiatesta) per spingere o sollevare la sedia quando è occupata, poiché questo potrebbe causare infortuni e danni.
- Assicuratevi che la sedia sia equipaggiata con manici per spingere e che le impugnature siano saldamente in posizione.
- Girate verso l'alto i dispositivi anti-ribaltamento o rimuoveteli per evitare di inciampare.
- Se avete bisogno di lasciare l'utente incustodito, bloccate le ruote con i freni e riportate i dispositivi anti-ribaltamento di nuovo nella posizione verso il basso.
- Chiedete a un assistente esperto di spiegarvi i metodi di assistenza di sicurezza.
- Assicurate una comunicazione continua tra voi e l'utente della sedia per evitare qualsiasi tipo di confusione.
- Mantenete una postura corretta per piegare o sollevare la sedia; mantenete la vostra schiena dritta e piegate le ginocchia.
- Chiedete all'utente ad appoggiare la schiena quando inclinate la sedia.

6.4 IN SELLA ALLA VOSTRA SEDIA A ROTELLE

6.4.1 PER RIDURRE IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO, DOVETE SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

1. CONSULTATE il vostro dottore, il vostro infermiere o il vostro terapeuta per sapere qual è per voi la migliore posizione dell'asse e delle rotelle (o qualsiasi altra configurazione).
2. CONSULTARE il vostro rivenditore autorizzato Motion Composites PRIMA di modificare o regolare la sedia a rotelle. Spesso, la regolazione che desiderate può essere compensata da un'altra che non avete considerato. Per esempio, potreste

regolare l'angolo dello schienale all'indietro, anche se questo aumenta la possibilità di un ribaltamento posteriore. Questa tendenza può essere controbilanciata muovendo le ruote posteriori all'indietro. Il vostro rivenditore autorizzato Motion Composites potrà darvi un'esperta consulenza in materia.

3. Fatevi SEMPRE assistere da qualcuno finché non imparate i punti di bilanciamento della vostra sedia e non vi sentite a vostro agio quando usate la sedia in tutte le condizioni, in modo da evitare ribaltamenti.
4. Usate SEMPRE dispositivi anti-ribaltamento.


Se non seguite queste avvertenze, rischiate di cadere, ribaltarvi, perdere il controllo, ferirvi seriamente e causare gravi danni alla sedia stessa.

6.4.2 PUNTO DI BILANCIAMENTO

- È importante apprendere tutte le caratteristiche specifiche della vostra sedia.
- Chiedete ad un professionista sanitario di spiegarvele.
- Portare uno zaino influenza il punto di bilanciamento della vostra sedia.
- Fate dunque attenzione alla posizione del vostro corpo, alla vostra postura e alla distribuzione del vostro peso. Il centro di gravità è influenzato dall'angolo della sedia su una rampa o una pendenza.
- Questo può essere avvertito nei movimenti in avanti e indietro e nei movimenti laterali.
- Assicuratevi di revisionare tutte le tecniche di guida prima di usare la sedia a rotelle. Usate i dispositivi anti-ribaltamento fino a che non siete capaci di guidare la sedia in qualsiasi situazione.

6.4.3 IMPENNATA

- Il sollevamento della sedia a rotelle comporta il sollevamento delle ruote anteriori da terra e il mantenimento dell'equilibrio sulle ruote posteriori (chiamato impennata).

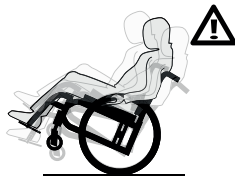

- Non cercate di eseguire un'impennata sulla vostra sedia, in quanto questa è una manovra molto pericolosa. Motion Composites riconosce che non tutti gli utenti sono consapevoli di questo avvertimento. Se in ogni caso scegliete di ignorarlo, cercate di seguire questi passaggi per eseguire l'impennata nel modo più sicuro possibile.
- Non cercate mai di imparare a fare un'impennata senza prima consultare il vostro assistente sanitario, o di eseguirla senza un'assistente che possa sorreggervi in caso di caduta. In ogni caso, non cercate mai di eseguire un'impennata se non siete un utente esperto della vostra sedia.
- Motion Composites raccomanda sempre di usare i dispositivi anti-ribaltamento in qualsiasi momento, a meno che non devono essere rimossi per passare su un marciapiede o uno scalino.




AVVERTENZA

Questi dispositivi devono essere re-istallati una volta che avete superato il suddetto marciapiede o scalino.

6.4.4 TRASFERIMENTO

- Ruotate le rotelle anteriori in avanti per aumentare la stabilità.
- Posizionate la sedia a rotelle il più vicino possibile al luogo di trasferimento.
- Bloccate le ruote con i freni.
- Posizionatevi il più indietro possibile quando trasferite il peso per ridurre il rischio di ribaltarvi in avanti. Se avete una buona forza, un buon bilanciamento e una buona agilità nella parte superiore del corpo, potete eseguire il trasferimento in modo indipendente.

- Ruotate o rimuovete i poggiatesta il più possibile per evitare di riversare il peso su di loro. Se questo è possibile, usate una tavola di trasferimento.

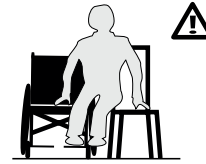

AVVERTENZE

Chiede sempre al personale sanitario di apprendere i metodi di trasferimento in sicurezza.

Per motivi di sicurezza, l'utente shoulderstand sempre di ridurre al minimo la distanza di trasferimento.

Non sedetevi o non trasferitevi sulla sedia a rotelle se questa non è completamente aperta e le rotaie del telaio del sedile non sono completamente inserite nei loro alloggiamenti.

Non usare la pedana come piattaforma per sedervi o alzarvi dalla sedia o per allungarvi verso un oggetto.

6.4.5 VESTIRSI


- Quando vi vestite o svestite sulla sedia, ruotate le rotelle anteriori in avanti e bloccate i dispositivi anti-ribaltamento nella posizione inferiore.
- Se la sedia non è equipaggiata con questi dispositivi, appoggiate al muro e bloccate le ruote posteriori.

6.4.6 ALLUNGARSI/APPOGGIARSI/PIEGARSI



AVVERTENZA

Il punto di bilanciamento può essere spostato quando state indossando vestiti e/o quando vi allungate verso un oggetto mentre siete seduti.

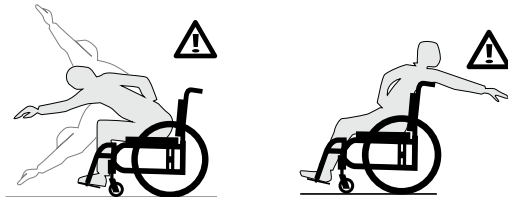

- Se è possibile, usate un dispositivo di allungamento o chiedete assistenza per raggiungere o prendere un oggetto.
- Muovete la sedia a rotelle il più vicino possibile all'oggetto richiesto.
- Ruotate le rotelle il più in avanti possibile dalle ruote posteriori.
- Non allungatevi mai verso oggetti posti fra le vostre gambe, ma piuttosto posizionatevi verso il lato in cui questi si trovano.
- Non spostate mai il vostro peso di lato, ma alzatevi dalla sedia o muovetevi in avanti sul sedile.
- Usate sempre entrambe le mani e afferrate la ruota o il bracciolo sul lato opposto se potete piegarvi lateralmente.
- Non sporgetevi mai verso il lato posteriore della sedia, a meno che questa non è equipaggiata con dispositivi anti-ribaltamento.
- Non allungatevi mai verso oggetti disposti sul lato posteriore del sedile: allungatevi soltanto fino a raggiungere l'estensione naturale del vostro braccio, senza mai muovervi sulla sedia.
- Non bloccare le ruote posteriori se vi allungate all'indietro. Evitare di fare pressione sulle pedane.


6.4.7 SPOSTARSI ALL'INDIETRO

- Bloccate i dispositivi anti-ribaltamento nella posizione inferiore. Muovetevi lentamente: la sedia a rotelle è stata progettata per fornirvi più stabilità quando vi muovete in avanti.
- Guardatevi intorno il più possibile per evitare gli ostacoli lungo il vostro cammino.

6.4.8 RAMPE, SALITE E PENDII

LE RAMPE DI 3 METRI O MENO DI LUNGHEZZA


- Se è necessario utilizzare una breve rampa 3 metri o meno, l'angolo di pendenza non deve superare i 10 gradi, che corrisponde ad una pendenza del 17,63%, un aumento di 0,53 metri su una distanza di 3 metri.

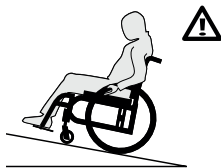

- Assicurarsi di essere assistito da un caregiver che ha la capacità fisica di mantenere la sedia a rotelle e la sua sedia a rotelle occupant.
- The deve sempre puntare verso l'alto il pendio.
- Il caregiver deve rimanere sempre in fondo al pendio per mantenere la carrozzina.
- Bloccare sempre il antiribaltamento in posizione di sicurezza.
- Seguire le stesse parole di cautela per una collina o una pendenza del 10% o meno.
- Non utilizzare la carrozzina su una rampa di sotto dei 3 metri di lunghezza, se l'angolo di pendenza è superiore a 10 gradi (17,63%).

LE RAMPE DI 3 METRI O PIÙ DI LUNGHEZZA

- Se si deve passare attraverso un pendio o un distivello di 3 metri o più, l'angolo di pendenza non deve superare 5,7 gradi, che corrisponde ad una pendenza del 10% è un aumento di 1 metro per una distanza di 10 metri.

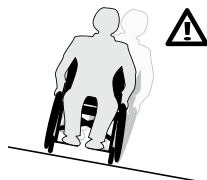

- Assicurarsi di essere assistito da un caregiver se avete problemi sulla pista o se la pendenza è tra 5,7 e 10 gradi.
- Provate a muovervi verso l'alto o verso il basso sul pendio.
- Evitate di girare quando vi trovate su una discesa.
- Rimanete nel centro del marciapiede e assicuratevi che ci sia abbastanza spazio per le ruote.
- Evitate di fermarvi sulle salite e non usate mai i freni delle ruote per decelerare su una discesa. Mantenete la vostra velocità afferrando i corrimani delle ruote.
- Non muovetevi su superfici bagnate o scivolose. Siate attenti al cambiamento dell'altezza del terreno o alle scale alla fine di un pendio (le rotelle anteriori potrebbero bloccarsi semplicemente colpendo una piccola protuberanza).
- Chiedete sempre aiuto in ogni situazione pericolosa.
- Inclinatevi mentre vi muovete giù per un pendio per aggiustare il vostro centro di gravità.
- Non utilizzare la carrozzina solo su pendii o irregolari di oltre 3 metri di lunghezza se l'angolo di pendenza è maggiore di 5,7 gradi (10%).

6.4.9 OSTACOLI

- Siate sempre attenti agli ostacoli o altri pericoli stradali (buche, superfici danneggiate, ecc..).
- Evitare di creare ostacoli nel vostro ambiente giornaliero (lavoro/casa). Non usate mai oggetti quali mobili, rampe o maniglie delle porte per spingervi fuori dalla sedia.
- Quando vi muovete su un ostacolo, appoggiate la parte superiore del vostro corpo leggermente in avanti, non fate marcia indietro, e mantenete entrambe le mani sul corrimano mentre ci passate sopra.

6.4.10 CORDOLI E SCALINI

- Vi cordoli e gli scalini non ostacoli estremamente pericolosi.
- Non cercate mai di andare su e giù su di un cordolo o scalino senza assistenza se non avete la necessaria esperienza. E' necessario che apprendiate come eseguire un'impennata in modo sicuro e che avete abbastanza forza e bilanciamento per controllare la sedia prima di eseguire una manovra così pericolosa.
- Sboccate SEMPRE i dispositivi anti-ribaltamento e ruotatele verso l'alto in modo da evitare queste manovre pericolose.
- Non cercate MAI di salire o scendere un cordolo o uno scalino più alto di 10 cm.
- Salire SEMPRE un cordolo o uno scalino direttamente verso l'alto o verso il basso, senza MAI muoversi in diagonale.
- Siate SEMPRE consapevoli che l'impatto che accade dopo la caduta da un cordolo o scalino può danneggiare la vostra sedia o causare la perdita d'importanti componenti.
- Se eseguite queste manovre, revisionate la vostra sedia frequentemente.
- Ruotate all'indietro e bloccate SEMPRE i dispositivi anti-ribaltamento per guidare la sedia in modo sicuro.


6.5 MUOVERSI CON L'AIUTO DI UN ASSISTENTE

Gli assistenti devono leggere la sezione "assistente" di questo manuale (Sezione 6.3).

6.5.1 SALIRE UN CORDOLO O UNO SCALINO

⚠ AVVERTENZE

1. Non cercate MAI di affrontare un cordolo o uno scalino senza assistenza.

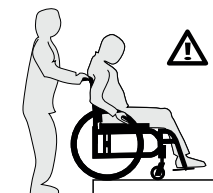


2. Chiedete al vostro assistente di porsi dietro la sedia, con la parte anteriore rivolta verso l'ostacolo.
3. Non cercate MAI di affrontare l'ostacolo all'indietro.
4. Chiedete al vostro assistente di inclinare la sedia sulle ruote posteriori in modo che le rotelle anteriori superano il cordolo o lo scalino.
5. Chiedete al vostro assistente di muovere lentamente la sedia in avanti e di abbassare gentilmente le rotelle sul livello superiore appena siete sicuri che queste siano oltre il bordo del cordolo o dello scalino.
6. Chiedete al vostro assistente di continuare a ruotare la sedia in avanti finché le ruote posteriori non siano in contatto con il cordolo o lo scalino
7. Chiedete al vostro assistente di sollevare e ruotare le ruote posteriori fino al livello superiore.
8. Avvertire l'assistente di non tentare mai di sollevare completamente la carrozzina dalle maniglie di spinta.

6.5.2 SCENDERE UN CORDOLO O UNO SCALINO

⚠ AVVERTENZE

1. Non cercate MAI di passare un cordolo o uno scalino senza assistenza.
2. Quando siete ad pochi metri dal bordo di un cordolo o uno scalino, chiedete al vostro assistente di stare nella parte posteriore della sedia e di girarla quando dovete affrontare l'ostacolo.

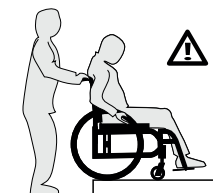


3. Non cercate MAI di superare un cordolo o un ostacolo simile rivolti in avanti.
4. Chiedete al vostro assistente di fare attentamente un passo indietro, tirando la sedia all'indietro, finché non si trova fuori il cordolo o lo scalino sul livello inferiore. L'assistente deve inoltre stare attento all'ostacolo quando fornisce questo supporto.
5. Chiedete al vostro assistente di tirare attentamente all'indietro la sedia finché le ruote posteriori si trovano sul bordo del cordolo o scalino, in modo da farle scorrere lentamente giù sul livello inferiore.
6. Chiedete al vostro assistente di inclinare la sedia all'indietro dal punto di bilanciamento delle ruote posteriori quando queste si trovano in modo sicuro sul livello inferiore, sollevando le rotelle dal livello superiore.
7. Chiedete al vostro assistente di ruotare lentamente la sedia all'indietro sulle ruote posteriori, facendo piccoli passi finché le rotelle non hanno superato lo scalino o il cordolo per poi abbassarle lentamente sul pavimento del livello inferiore.
8. Avvertire l'assistente di non tentare mai di sollevare completamente la carrozzina dalle maniglie di spinta.

6.5.3 SCALE

- Usate sempre un ascensore quando questo è possibile.
- Chiedete aiuto a due persone per muovere la sedia su e giù per le scale (gli assistenti devono leggere la sezione 6.3 *Assistenti* di questo manuale).
- Allacciare la cintura di posizionamento durante il sollevamento sulla sedia a rotelle.
- L'assistente deve sempre afferrare il telaio della carrozzina per accomodare l'utente sulla carrozzina. Non deve MAI accomodare l'utente sulla carrozzina afferrando le maniglie di spinta, le canne posteriori, il poggiatesta, il poggiatesta o le parti mobili della carrozzina.

6.5.4 SALIRE UNA RAMPA DI SCALE

-  **AVVERTENZA**
NON SALIRE MAI una rampa di scale con l'utente ancora sulla sedia

Motion Composites riconosce che alcuni utenti, in certe occasioni, non hanno altra scelta e hanno bisogno di essere spostati e sollevati su e giù una rampa di scale. Gli assistenti e gli utenti devono seguire i seguenti passaggi quando non c'è nessun'altra alternativa.

1. Non cercate MAI di superare più di uno scalino a meno che non ci sono due assistenti adulti ad aiutarvi.
2. Posizionate SEMPRE la sedia a rotelle e l'utente con le spalle rivolte verso le scale, con un assistente sul retro (con le spalle rivolte verso le scale) e uno sulla parte anteriore (con il viso rivolto verso l'utente).
3. L'assistente posto sul retro della sedia ha il controllo e sa come salire la rampa di scale. Deve inclinare la sedia all'indietro per trovare il punto di bilanciamento sulle ruote posteriori.
4. Non cercate MAI di sollevare la sedia afferrando qualsiasi parte disponibile, incluso la fodera, i manici rimovibili o le impugnature.
5. Mantenere SEMPRE la sedia afferrando una parte solida del telaio.
6. Il secondo assistente sulla parte anteriore deve afferrare il telaio in maniera decisa (escludendo i poggiatesta o la pedana) con entrambe le mani e sollevare la sedia affrontando uno scalino alla volta.
7. Ogni assistente deve muoversi con attenzione fino allo scalino successivo.
8. Ripetete i passaggi dal punto 1 al punto 6 finché non raggiungete la cima della scala.
9. Quando avete raggiunto la cima, gli assistenti devono far rotolare la sedia all'indietro sulle sue ruote posteriori finché le rotelle hanno superato l'ultimo scalino. A questo punto gli assistenti possono abbassare gentilmente le rotelle sul pavimento.
10. L'assistente deve sempre afferrare il telaio della carrozzina per accomodare l'utente sulla carrozzina. Non deve MAI

accomodare l'utente sulla carrozzina afferrando le maniglie di spinta, le canne posteriori, il poggiatesta, il poggiatesta o le parti mobili della carrozzina.

6.5.5 SCENDERE UNA RAMPA DI SCALE

-  **AVVERTENZA**
NON SCENDERE una rampa di scale con l'utente nella sedia.

Motion Composites riconosce che alcuni utenti, in certe occasioni, non hanno altra scelta e hanno bisogno di essere spostati e sollevati su e giù una rampa di scale. Gli assistenti e gli utenti devono seguire i seguenti passaggi quando non c'è nessun'altra alternativa.

1. Non cercate MAI di superare più di uno scalino a meno che non ci sono due assistenti adulti ad aiutarvi.
2. Posizionare SEMPRE la sedia a rotelle e l'utente con la faccia rivolte verso le scale, con un assistente sul retro (con la faccia rivolte verso le scale) e uno sulla parte anteriore (con il viso rivolto verso l'utente).
3. L'assistente posto sul retro della sedia ha il controllo e sa come scendere la rampa di scale. Deve inclinare la sedia all'indietro per trovare il punto di bilanciamento sulle ruote posteriori.
4. Non cercate MAI di sollevare la sedia afferrando qualsiasi parte disponibile, incluso la fodera, i manici rimovibili o le impugnature.
5. Mantenere SEMPRE la sedia afferrando una parte solida del telaio.
6. Il secondo assistente sulla parte anteriore deve afferrare il telaio in maniera decisa (escludendo i poggiatesta o la pedana) con entrambe le mani e sollevare la sedia affrontando uno scalino alla volta.
7. Ogni assistente deve muoversi con attenzione fino allo scalino successivo.
8. Ripetere i passaggi dal punto 1 al punto 6 finché non raggiungete il fondo della scala.
9. Quando avete raggiunto il fondo, gli assistenti devono far rotolare la sedia in avanti finché le ruote posteriori hanno superato l'ultimo scalino. A questo punto gli assistenti possono abbassare gentilmente le rotelle anteriori e le ruote posteriori sul pavimento.
10. L'assistente deve sempre afferrare il telaio della carrozzina per accomodare l'utente sulla carrozzina. Non deve MAI accomodare l'utente sulla carrozzina afferrando le maniglie di spinta, le canne posteriori, il poggiatesta, il poggiatesta o le parti mobili della carrozzina.

Se ignorate queste avvertenze, rischiate di cadere, rovesciarvi, perdere il controllo della sedia, ferirvi gravemente, e causare seri danni alla sedia stessa.

6.5.6 SCALE MOBILI


In nessuna circostanza la sedia a rotelle deve essere usata sulle scale mobili, nemmeno con l'aiuto di un assistente. Questo potrebbe causare gravi infortuni.

7. COME UTILIZZARE LA SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES

7.1 CHIUDERE E APRIRE LA SEDIA A ROTELLE

7.1.1 CHIUDERE LA SEDIA A ROTELLE

- Ruotate le alberature anteriori in avanti finché non si bloccano
- Sollevate le pedane
- Rimuovete il cuscino del sedile
- Sollevate la maniglia sulla fodera del sedile
- Spingete le ruote l'una verso l'altra.

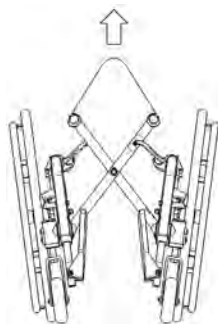

7.1.2 APRIRE LA SEDIA A ROTELLE

AVVERTENZA

Quando aprite la sedia a rotelle, state attenti a non mettere le dita tra i perni o sotto le guide del sedile. Spingete o tirate sempre la fodera del sedile. Assicuratevi che la sedia a rotelle sia completamente aperta prima di sedervi.

- Inclinare la sedia verso di voi; assicuratevi che le ruote sul lato opposto sollevate dal pavimento.
- Spingere il bordo della fodera del sedile verso di voi finché non si chiude correttamente.
- Premere verso il basso con entrambe le guide del sedile, in modo da impegnare il meccanismo di bloccaggio della sedia a rotelle. Dovete spingere giù al centro delle guide del sedile per assicurarvi che queste siano correttamente posizionate nei loro supporti. Sentirete un click tra i due componenti del telaio.

7.2 FRENI


AVVERTENZE

Non usare mai i freni delle ruote per fermare la sedia in movimento. I BLOCCHI DELLE RUOTE NON SONO FRENI STANDARD. Assicuratevi che la superficie non sia scivolosa, in quanto la sedia potrebbe muoversi anche quando i freni sono impegnati.

Assicuratevi che i freni siano inseriti di almeno 3 mm nella gomma dello pneumatico quando la sedia è nella sua posizione di blocco. Pneumatico deve essere gonfiato correttamente.

Assicuratevi che la sedia sia stabile e bloccata con i freni delle ruote.

- Per impegnare i freni, spingere la maniglia in avanti (per il tipo "spingi e blocca") o tirare il blocco all'indietro (per il tipo "tira e blocca") finché quest'ultimo non è completamente impegnato.
- Per rilasciare i freni, tirare la maniglia all'indietro (per il tipo "spingi e blocca") o spingete la maniglia in avanti (per il tipo "tira e blocca") finché il freno sia completamente disinserito.

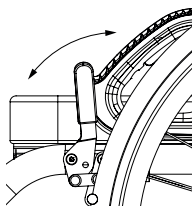

7.3 ALBERATURE ANTERIORI

7.3.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

INSTALLAZIONE (tranne Veloce)

- Inserire il perno dell'astina anteriore nel tubo di montaggio della carrozzina
- Ruotare il meccanismo in avanti fino a quando non si blocca in sede.
- Ripetere gli stessi passaggi sull'altro lato.

RIMOZIONE (tranne Veloce)

- Spingere la leva di sblocco (1) (Fig. a) verso l'interno o l'esterno e mantenerla in questa posizione in modo che le astine anteriori possano ruotare liberamente.
- Ruotare le astine anteriori verso l'esterno o verso l'interno per disinnestare il meccanismo di blocco.
- Sollevare il meccanismo (Fig. b) per sganciarlo dal telaio della carrozzina.
- Ripetere la stessa procedura sull'altro lato.



Fig. a



Fig. b

APERTURA E CHIUSURA DEL POGGIPIEDI DI VELOCE

- Il modello Veloce è provvisto di una pedana ribaltabile (Fig. c) o ripiegabile (Fig. d).
- La pedana ripiegabile si apre e chiude automaticamente quando la carrozzina viene aperta e richiusa.
- Il modello a pedana singola ribaltabile si apre e chiude nel modo seguente.
- Ruotare l'anello (1) per sbloccare e aprire il meccanismo di blocco.
- Sollevare (2) la pedana per aprirla.
- In chiusura, assicurarsi di fissare la testa dell'asta al meccanismo di blocco.
- Dopo la chiusura, verificare che la pedana sia ben fissata.

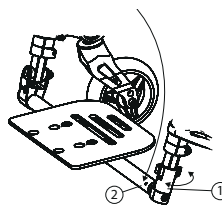


Fig. c

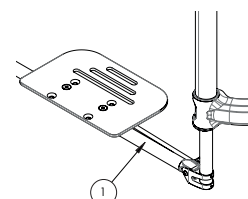


Fig. d

7.4 POGGIPIEDI

- Durante il trasferimento, evitate di poggiare il peso sul poggiatesta e state attenti a non stare dietro di esso.
- Non usate mai i poggiatesta per sollevare la sedia.
- Usate solo parti non staccabili per sollevare la sedia.


7.4.1 PEDANA AD ELEVAZIONE (NON DISPONIBILE SU VELOCE)

7.4.1.1 INSTALLAZIONE DELLA PEDANA AD ELEVAZIONE

- Rimuovete il poggiatesta (vedere sezione 7.3.1)
- Installate il poggiatesta elevabile nello stesso modo in cui avete installato l'alberatura regolare (vedere sezione 7.3.1)

7.4.1.2 REGOLAZIONE DELLA PEDANA AD ELEVAZIONE

- Per cambiare la lunghezza del poggia-gambe, tirate la leva (1) per aprire il morsetto
- Modificare la lunghezza e premere sulla leva (1) per chiudere il morsetto.
- Per cambiare l'angolazione del poggiapiedi, impostare l'angolo desiderato mentre si preme il pulsante rosso (2).

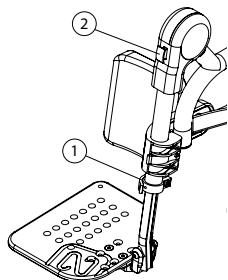

7.5 BRACCIOLI

Assicuratevi che i braccioli e i tasti di rilascio siano bloccati prima di usare la sedia.

- Non sollevate mai la sedia afferrando i braccioli
- Usate solo parti non staccabili per il sollevamento.


7.5.1 BRACCIOLI FLIP-BACK

PER SOLLEVARE I BRACCIOLI

- Tirate la leva (1) verso l'alto per rilasciare il sistema.
- Ruotate il bracciolo su e giù.

PER RE-INSTALLARE I BRACCIOLI NELLA POSIZIONE DI CHIUSURA

- Ruotate i braccioli verso il basso finché la piastra scorrevole anteriore entra nell'alloggiamento del bracciolo e scatta in posizione.
- Assicuratevi che la leva di bloccaggio sia impegnata per evitare qualsiasi movimento involontario.

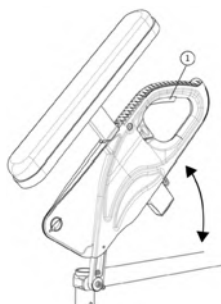


7.5.2 BRACCIOLI A T RIMOVIBILI

PER RIMUOVERE I BRACCIOLI

- Tirate la leva (1) verso l'alto per rilasciare il sistema.
- Tirate i braccioli in alto.

PER RE-INSTALLARE I BRACCIOLI:


- Muovete i braccioli verso il basso finché la slitta (2) non entra nell'alloggio del bracciolo (3) e scatta in posizione.
- Assicuratevi che la leva di bloccaggio sia impegnata per evitare qualsiasi movimento involontario.

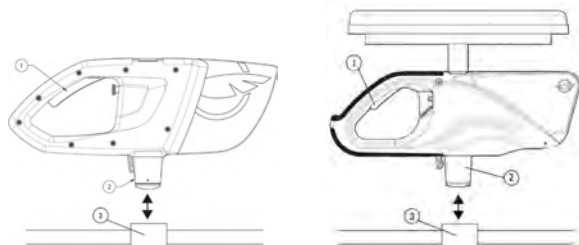

7.5.3 BRACCIOLI OSCILLANTI

PER RIMUOVERE I BRACCIOLI DALLA SEDIA A ROTELLE

- Sollevateli leggermente per rilasciarli. (1)
- Per re installare i braccioli, inseriteli di nuovo nell'alloggiamento (1) fino a che non ritornano in posizione.

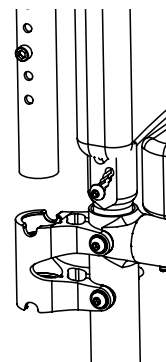

7.6 CINTURE DI POSIZIONAMENTO




AVVERTENZE

Usate le cinture di sicurezza SOLO per aiutare a sostenere la postura dell'utente. L'uso improprio delle cinture può causare gravi infortuni.

Assicuratevi che l'utente non scivoli giù dal sedile della sedia a rotelle

In questo caso, l'utente potrebbe subire compressioni toraciche o soffocare a causa della pressione da parte delle cinture stesse.

- Non utilizzare mai le cinture della sedia a rotelle come sistema di ritenuta del veicolo a motore.
- La cintura di posizionamento deve essere utilizzata sempre nel rispetto delle istruzioni.
- Dovrebbe essere lasciata una distanza equivalente a circa una mano tra la cintura di posizionamento e la coscia.
- Assicurarsi che la cintura di posizionamento sia adeguatamente allacciata per evitare lesioni gravi.
- Assicurarsi che, in caso di emergenza, la cintura di posizionamento possa essere facilmente slacciata.

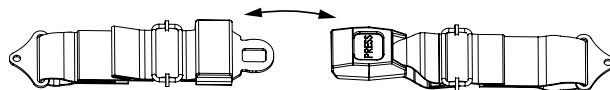

7.6.1 CINTURE DI POSIZIONAMENTO CON FIBBIA PER AUTOMOBILE E PER AERO

- Per allacciarle, inserire la clip nella fibbia fino a quando • Assicuratevi che la cintura di posizionamento sia fissata saldamente.
- Per sganciarla, sollevare l'aletta sulla cintura con fibbia per aereo oppure premere il pulsante sulla cintura con fibbia per automobile.
- Per regolare la cintura di sicurezza, tirare ciascuna cinghia verso il lato opposto fino a raggiungere la tensione desiderata mantenendo la fibbia in posizione centrale.

7.6.2 CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON VELCRO™


- Per allacciarla, inserire il lato lungo della cintura nella fibbia posta sull'altro lato.
- Premere sulla cintura fissare saldamente il velcro.

7.7 ANTIRIBALTAMENTO

7.7.1 ANTIRIBALTAMENTO

i **RACCOMANDAZIONE**
 Motion Composites raccomanda vivamente di usare i dispositivi anti-ribaltamento.

- I dispositivi anti-ribaltamento sono stati progettati per prevenire le cadute dalla sedia.
- Per rimuovere o ruotare il dispositivo anti-ribaltamento verso l'alto, premete il pulsante di rilascio (1) ed estraete o ruotate il dispositivo (2).
- Per sostituire il dispositivo anti-ribaltamento, premete il pulsante di rilascio e inserite il dispositivo stesso nel telaio finché non scatta in posizione.
- Massima altezza cordolo: da 3,8 a 5 cm, a seconda della configurazione.

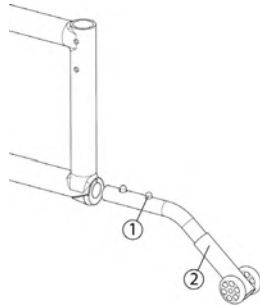


! **AVVERTENZA**
 Antiribaltamento non deve essere usato come un ribaltamento soccorso.
 Installare sempre entrambi antiribaltamento.

7.7.2 DISPOSITIVI ANTI-RIBALTAMENTO RIPIEGABILI

! **AVVERTENZA**
 Motion Composites raccomanda vivamente l'utilizzo di dispositivi anti-ribaltamento. Per utenti di peso non superiore a 120 kg (265 libbre), è possibile utilizzare un solo dispositivo anti-ribaltamento. Per utenti di peso superiore a 120 kg (265 libbre) (max. 160 kg - 350 libbre), si devono assolutamente utilizzare due dispositivi anti-ribaltamento ripiegabili.

- I dispositivi anti-ribaltamento sono progettati per impedire che la sedia a rotelle si ribalti all'indietro.
- Per spostarli sotto la sedia a rotelle, spingere sul tappo, quindi ruotare il dispositivo anti-ribaltamento di 180° in direzione opposta rispetto alla ruota.

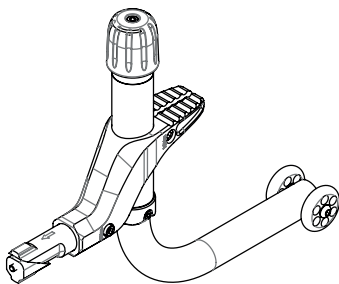


7.7.3 LEVA ANTIRIBALTAMENTO

! **AVVERTENZA**
 La leva antiribaltamento Motion Composites non va utilizzata con i dispositivi antiribaltamento.

- Per installare o rimuovere la leva antiribaltamento, premere il pulsante di rilascio (1) e spingere o tirare la leva (2).
- Quando si inserisce la leva antiribaltamento, il pulsante deve scattare in sede nel telaio.

- a leva antiribaltamento va rimossa quando si installano i dispositivi antiribaltamento.

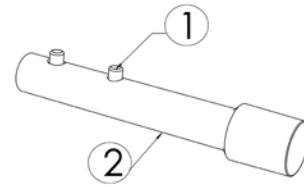


7.8 RUOTE POSTERIORI

7.8.1 ASSI A SGANCIO RAPIDO

i **INFORMAZIONI**
 Gli assi a sgancio rapido in acciaio sono un componente standard della sedia a rotelle. Altri tipi di assi sono elementi opzionali.


! **AVVERTENZA**
 Tutti gli assi a sgancio rapido sono stati progettati per permettervi di sganciare Sedia a rotelle Motion Compositesmente le ruote posteriori. Tuttavia, se non sono usate in modo appropriato, possono essere pericolose. Non usare mai la vostra sedia se non siete sicuri che ambedue ruote siano fissate in posizione nel ricevitore. Se uno degli assi non è fissato in modo appropriato, la ruota potrebbe staccarsi durante il movimento e causare una caduta. Potete capire quando un asse è fissato in posizione grazie al pulsante di rilascio rapido al centro dell'asse stesso, il quale esce completamente fuori. Come precauzione finale, potete tirare la ruota per verificare che l'asse sia appropriatamente fissato.

- Per rimuovere la ruota posteriore, spingete il pulsante al centro del mozzo e tirare la ruota (1).
- Per installare di nuovo la ruota posteriore, premete il pulsante dell'asse di sgancio rapido, inserite l'asse nella boccola e rilasciate il pulsante.
- Assicuratevi sempre che le sfere d'arresto (2) si estendano oltre la boccola dell'asse per un blocco sicuro.

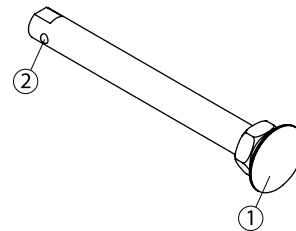

7.8.2 ASSI FISSI

- Rimuovete le ruote posteriori: svitate il bullone (1) posto dentro il boccolo ed estraete la ruota.
- Per reinstallare la ruota posteriore sulla sedia: inserite l'asse filettato (2) nella boccola.
- Stringete il bullone (1) e assicuratevi che la ruota gira senza alcuna restrizione.

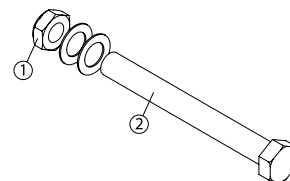

7.8.3 SISTEMA DI GUIDA A UN SOLO BRACCIO

UTILIZZO


- Per fare avanzare la carrozzina in linea retta, afferrare i due corrimani con una mano e spingere o tirare nella direzione desiderata.
- Per rallentare la carrozzina, premere simultaneamente sui due corrimani con un mano per creare attrito.
- Per girare la carrozzina, esercitare pressione o creare attrito su uno dei due corrimani di guida.

PER RIPIEGARE LA CARROZZINA

- Impugnare la maniglia (1) e schiacciare l'albero di trasmissione (2) sulla piastra di montaggio per liberare il lato opposto dell'albero.
- Rimuovere l'albero di trasmissione dalla carrozzina e ripiegarlo.

PER INSTALLARE IL SISTEMA DI GUIDA A UNA SOLA MANO

- Inserire l'estremità dell'albero di trasmissione (3) sull'asse della piastra di montaggio (4).
- Schiacciare l'albero di trasmissione e inserire l'altra estremità dell'albero sull'asse della piastra di montaggio sul lato opposto.
- Assicurarsi che l'asse sia ben fissato prima di utilizzare la carrozzina.

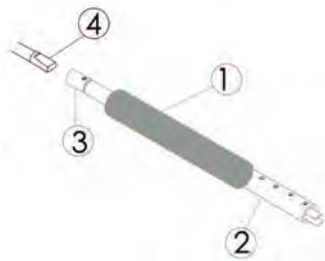

SPECIFICHE TECNICHE

- Limite di peso 265 lb / 120 kg
- Le ruote posteriori restano attaccate alla carrozzina.

7.9 IMBRACATURE DI SICUREZZA

- Le imbracature non sono destinate a essere usate come superficie di appoggio. Usate sempre un cuscino.
- Assicuratevi che le imbracature sono in buone condizioni (per esempio, senza sfilacciamenti, nessuna forma di usura e senza lacerazioni).

7.10 MANICI PER SPINGERE


I manici per spingere sono degli elementi opzionali su alcune sedie Motion Composites. Essi forniscono dei punti sicuri che l'assistente può usare per mantenere la parte posteriore della sedia e prevenire cadute e rovesciamenti. Se avete un assistente a vostra disposizione, dovete far installare i manici sulla vostra sedia da Motion Composites o da un rivenditore Motion Composites certificato.

- Motion Composites offre manici per spingere che sono integrati con le canne posteriori o manici per spingere sganciabili. Motion Composites raccomanda di non utilizzare manici non originali, in quanto questi potrebbero danneggiare lo schienale o le canne posteriori.
- Il vostro assistente deve controllare regolarmente le impugnature dei manici per assicurarsi che questi siano adattati in modo appropriato senza rotazioni o scivolamenti.
- I manici per spingere non devono mai essere usati per sollevare la sedia a rotelle o tirare la sedia, specialmente quando questa è occupata, in quanto potrebbero staccarsi.
- Alzate o tirate la sedia afferrando SEMPRE le parti non staccabili del telaio (non i manici staccabili, lo schienale, i braccioli o il poggiatesta).
- Se non seguite queste avvertenze potrebbero accadere danni, cadute, rovesciamenti, e perdite di controllo, oltre a gravi infortuni per l'utente, l'assistente o altre persone.

7.10.1 MANIGLIE DI SPINTA RIBALTABILI

ISTRUZIONI SUI PIEGHEVOLI

- Per piegare o aprire la maniglia premere il pulsante (1) per innestare il meccanismo di piegatura.
- Il limite di peso è 265 lb / 120 kg.

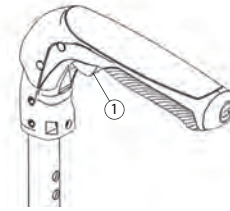


AVVERTENZA

Non utilizzare MAI le maniglie per sollevare la sedia a rotelle o tirare la sedia, specialmente quando è occupata, in quanto potrebbe allentarsi.

7.10.2 REGOLAZIONE DELLE MANIGLIE DI SPINTA AD ALTEZZA REGOLABILE

ISTRUZIONI SULLA REGOLAZIONE

- Per regolare l'altezza delle maniglie di spinta, tirare la leva (1) per aprire il morsetto.
- Impostare l'altezza e premere la leva (1) per chiudere il morsetto.
- Il limite di peso è 265 lb / 120 kg.

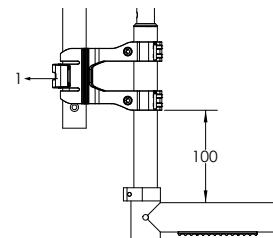

AVVERTENZA

Non utilizzare MAI le maniglie richiuse per sollevare o tirare la carrozzina, specialmente se occupata, in quanto c'è il rischio che si stacchino.



INFORMAZIONI

La posizione del morsetto sulle canne posteriori non deve essere modificata. La distanza tra il morsetto della maniglia di spinta regolabile e il morsetto delle canne posteriori non deve essere superiore a 100 mm.

8. REGOLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VOSTRA SEDIA A ROTELLE MOTION COMPOSITES

8.1 SERVIZI

Fate riferimento al vostro rivenditore autorizzato per i servizi. La lista completa e aggiornata di tutti i servizi è disponibile sul nostro sito web.

8.2 PARTI DI RICAMBIO

Consultate il nostro sito web per scaricare il manuale delle parti e visualizzare le informazioni sugli ordini.

Vi preghiamo di contattarci al seguente indirizzo:

Motion Composites Inc.
160 Armand Majeau Sud, Saint-Roch-de-l'Achigan, Québec, Canada
J0K 3H0

Telefono: 1 866 650-6555

Fax: 1 888 966-6555

support@motioncomposites.com

motioncomposites.com

8.3 ATTREZZI NECESSARI

i INFORMAZIONI

Sedia a rotelle Motion Composites è stata progettata per essere gestita con attrezzi regolari. Tutte le viti e i bulloni sono di tipo e dimensioni standard e possono essere regolati con chiavi, chiavi a tubo, o chiavi a brugola.

! AVVERTENZE

Non usare attrezzi ad aria o elettrici, in quanto il serraggio deve essere eseguito manualmente.

La lista degli attrezzi si trova alla fine di questo manuale.

8.4 MANUTENZIONE GENERALE

8.4.1 PRESSIONE DELLE RUOTE

- Controllate la pressione delle ruote con un manometro.
- Verificate la pressione raccomandata, com'è indicata sullo pneumatico.
- Gonfiate lo pneumatico se la pressione è più bassa del valore raccomandato sul lato.
- Non gonfiate lo pneumatico oltre la pressione raccomandata, come indicato sullo pneumatico.
- Una gonfiatura eccessiva potrebbe causare rotture dello pneumatico e infortuni per l'utente.
- Una gonfiatura insufficiente potrebbe causare rotture dello pneumatico.

		Pressione massima
Pneumatico	1 ³ / ₈ "	65 psi
Alta pressione Pneumatico	1 ¹ / ₄ " e 1 ³ / ₈ "	110 psi
Alta pressione Pneumatico	1"	145 psi

8.4.2 PUNTURA

- In caso di foratura, consultare un'officina appropriata (un centro di riparazione di biciclette o un centro di riparazione di sedie a rotelle) per riparare o sostituire il tubo dell'aria da una persona qualificata.

8.4.3 PULIZIA DELLA SEDIA A ROTELLE

- Usate un panno morbido con acqua e sapone
- Risciacquate e asciugate adeguatamente.
- Non utilizzare detergenti solvent.
- Non usate detergenti abrasivi.
- Non usate pulitori a pressione.

RIVESTIMENTO DELLA PITTURA E TELAIO

- Pulire le superfici verniciate con sapone neutro, almeno una volta al mese.
- Proteggere la vernice con uno strato di cera auto non abrasiva ogni tremesi.

ASSALI E PARTI MOBILI

- Pulire intorno assi e parti in movimento settimanale con un panno leggermente umido.
- Rimuovere la polvere o sporcizia sulle assi o parti in movimento.

TAPPEZZERIA

- Solo lavaggio a mano (lavatrice potrebbe danneggiare il tessuto).
- Appendere ad asciugare solo. NON macchina a secco sotto forma di calore può danneggiare il tessuto.

8.4.4 CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLA SEDIA A ROTELLE


- Quando non usate la sedia, riponetela in un luogo pulito e asciutto. In caso contrario, potreste farla arrugginire o corrodere.
- Se la sedia è stata depositata per più di qualche settimana, assicurate il suo corretto funzionamento prima dell'uso. Se necessario, controllate tutti le voci indicati nella sezione 11. *Lista Controllo di Sicurezza*.
- Se la tua sedia a rotelle è rimasta in magazzino per più di due mesi, deve essere ispezionata da un tecnico qualificato.

- Quando si spedisce la sedia a rotelle utilizzare una scatola di cartone resistente per proteggere la sedia a rotelle da qualsiasi impatto. Ispezionare la sedia a rotelle una volta ricevuta.

8.5 SCHIENALE


8.5.1 RIMOZIONE/ISTALLAZIONE DELLE CANNE POSTERIORI

- Allentate i bulloni superiori (1) e (2), che sono anche usati per supportare gli incavi dei braccioli (oscillanti e Flip Back).
- Fate scorrere l'asta posteriore per rimuoverla dal tubo.
- Installate di nuovo l'asta posteriore in modo inverso e stringete le viti con fermezza.
- Stringete i bulloni (1) e (2) strettamente.
- Sedia a rotelle equipaggiata con braccioli Flip Back; stringete la vite (1) mentre prestate particolare attenzione alla forza necessaria per ribaltare il bracciolo all'indietro.

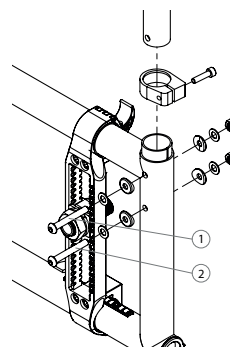

8.5.2 OPZIONE REGOLABILE IN PROFONDITÀ

- Allentate i bulloni superiori (1 e 2), che sono anche usati per supportare l'incavo del bracciolo (bracciolo Flip Back).
- Installate di nuovo l'asta posteriore in modo inverso e stringete le viti con fermezza.
- Stringete i bulloni (1) e (2) strettamente.

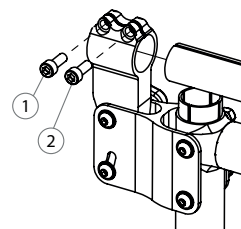

AVVERTENZE

Peso massimo 175 lb (79 kg) e non compatibile con WC-19

8.5.3 REGOLAZIONE DELL'ANGOLO POSTERIORE

- Allentate la vite (1) e rimuovete la vite (2) dal dispositivo di livellamento (figura a o b a seconda del modello di sedia).
- Regolate l'angolo desiderato facendo scorrere il meccanismo.
- Installate di nuovo la vite (2) e stringete entrambe le viti per adattarle strettamente.
- Impostazioni: incrementi di 5° da 85 a 110° - (Kids 90 a 105°)

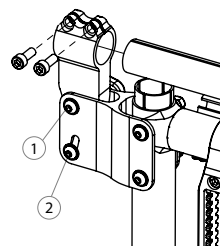


Fig. a

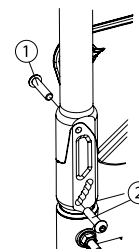


Fig. b

8.5.4 RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLA CINTURA DI POSIZIONAMENTO

- Togliere la vite (1) per rimuovere il morsetto della cintura di posizionamento (2) (Fig. a).
- Installate di nuovo la vite (1) direttamente sul morsetto del telaio (3) (Fig. b).
- Stringere la vite (1) finché questa non sia fissata in modo appropriato.
- Ripetete gli stessi passaggi dall'altro lato.


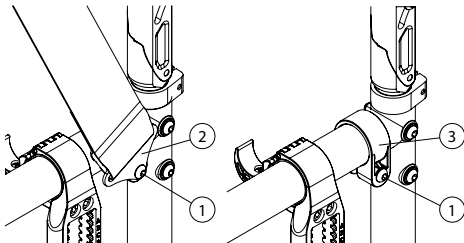


Fig. a

Fig. b


8.5.5 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLO SCHIENALE

- Allentate la vite (1) che supporta la fodera posteriore.
- Spingete giù la fodera di alcuni centimetri in modo da arrivare alla vite (2) che sorregge il manico per spingere.
- Rimuovete la vite (2) e il manico dello schienale.
- Muovete il dado dowel (3) posizionato dentro il manico per regolare l'altezza dello schienale con l'aiuto di un'asta filettata (1/4"-20).
- Una volta che avete compiuto questo passaggio, usate la vite (2) per sorreggere il dado dowel (3) mentre rimuovete il dado filettato.
- Rimuovete la vite (2) e installate il manico dello schienale
- Allineate la vite (2) con un foro di montaggio.
- Installate di nuovo e stringete la vite (2) e la rondella.
- Ripetete gli stessi passaggi dall'altro lato.
- Installate di nuovo la fodera dello schienale con la vite (1) e stringetela per adattarla fermamente.

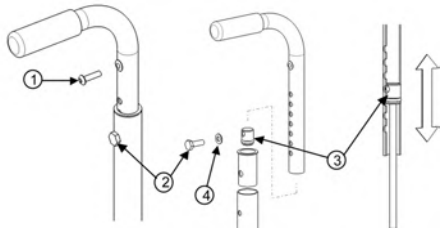


8.5.6 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLO SCHIENALE (MANIGLIA A SPINTA INTEGRATA)

- Lo schienale di 8 gradi con maniglie di spinta integrate può essere regolato rimuovendo i 2 bulloni su ciascun lato del telaio e spostando le barre posteriori verso l'alto o verso il basso all'altezza desiderata. Maniglie e schienale saranno regolati di conseguenza.
- Le canne dello schienale con angolo regolabile sono fisse.
- L'altezza dello schienale non può essere regolata su questo modello.

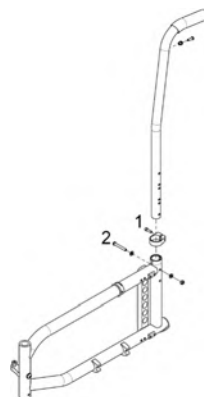


8.5.7 INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA FODERA

- Rimuovete la vite (1) che sorregge la fodera posteriore.
- Spingete la fodera dello schienale giù di alcuni centimetri per raggiungere la vite (2) che sorregge il manico per spingere.
- Rimuovere la vite (2) e poi rimuovete il manico dello schienale.
- Rimuovete o installate di nuovo la fodera.
- Una volta che avete montato la nuova fodera, installate i manici allineandoli con i fori di montaggio.
- Installate e stringete la vite (2) strettamente.
- Installate la fodera e fissatela fermamente con la vite (1) su ognuno delle canne posteriori.

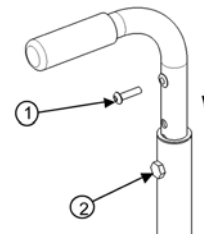


8.5.8 INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA FODERA (MANIGLIA A SPINTA INTEGRATA)

- Rimuovere la vite (1) che trattiene il rivestimento posteriore.
- Rimuovere i 2 bulloni su ciascun lato del telaio e rimuovere i tubi dello schienale.
- Rimuovere o installare di nuovo rivestimento.
- Reinstallare e serrare la vite (2) con fermezza.
- Installare di nuovo tappezzeria in e fissarlo saldamente con la vite (1) su ogni canna indietro.

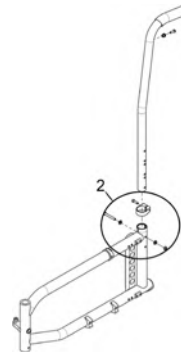

8.5.9 INSTALLAZIONE / RIMOZIONE TENSIONE REGOLABILE POSTERIORE TAPPEZZERIA

- Per rimuovere la tensione regolabile posteriore Tappezzeria, utilizzare la stessa procedura il rivestimento posteriore standard. Sollevare il coperchio posteriore per avere accesso alle 2 viti per rimuovere il rivestimento.
- Per regolare la tensione, prima sollevare il lembo di back-copertura per esporre le cinghie orizzontali (a). Rilasciare le cinghie in velcro, quindi regolare ogni cinghia utilizzando singolarmente il velcro o il sistema di regolazione della tensione fibbia per la tensione desiderata.

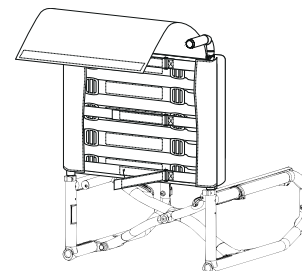

⚠ ATTENZIONE

Evitare un eccessivo irrigidimento del gruppo cinghia come questo potrebbe danneggiare l'integrità dei tubi dello schienale.

Infine, ribaltare il lembo di back-copertura sopra le cinghie di regolazione orizzontale per completare la regolazione.

8.6 BRACCIOLIO

8.6.1 INSTALLAZIONE DEI BRACCIOLI FLIP BACK

- Inserite il perno flip back (1, 2) e avvitatelo in posizione, assicurandovi che questo possa rimanere in posizione ma anche ruotare facilmente (Fig. a).
- Inserite il bracciolo (Fig. b) sul perno flip back poi ruotale finché non scatta nel ricevitore del bracciolo (Fig. c) (per l'installazione del morsetto, vedete la sezione 7.5 sull'installazione dei braccioli removibili a T).

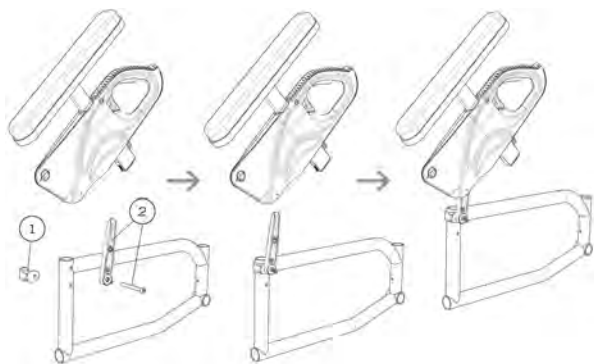



Fig. a

Fig. b

Fig. c

8.6.2 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEI BRACCIOLI FLIP-BACK E DEI BRACCIOLI A T


- Ribaltate la leva (1) a sinistra o a destra per sbloccare il bracciolo.
- Per regolare l'altezza, fate scivolare la parte superiore del bracciolo nella parte inferiore.
- Regolate la struttura (2) all'altezza desiderata.
- Ribaltate la leva all'indietro nella posizione di chiusura.
- Assicuratevi che il bracciolo scatta in posizione per completare il fissaggio.

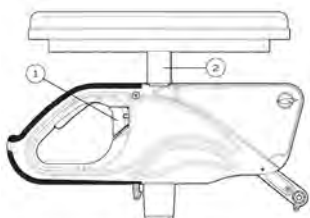

8.6.3 INSTALLAZIONE DEI BRACCIOLI RIMOVIBILI A T E DELLA PROTEZIONE RIGIDA LATERALE

- Installate il ricevitore del bracciolo (1) sul tubo posteriore del telaio a una distanza di 160 mm (6 1/4") dal tubo posteriore.
- Stringete leggermente la vite (2) per permettere al morsetto di rotare.
- Inserire il bracciolo o la protezione laterale nel ricevitore (1).

- Ruotate il ricevitore (1) finché la protezione laterale non si posiziona perpendicolarmente al sedile.
- Stringete le viti (2) strettamente.

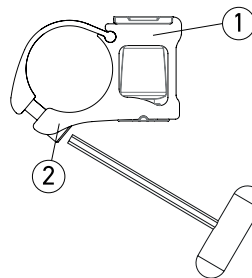

8.6.4 INSTALLAZIONE DEI MORSETTI DI PROTEZIONE O PER I VESTITI

- Aprire il morsetto (1) per installarlo attorno al palo posteriore in modo che il dito (2) sia parallelo alle ruote posteriori (Fig. a).
- Assicurarsi di posizionare il morsetto il più in alto possibile senza superare la protezione per i vestiti (3), verificando che sia inserito il più lontano possibile nel dito (Fig. b).
- Una volta in posizione, fissare il morsetto stringendo saldamente la vite.


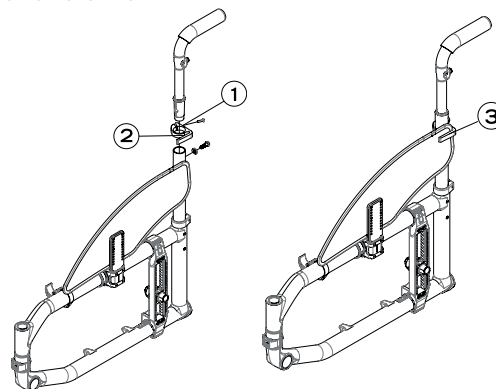


Fig. a

Fig. b


8.6.5 SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DEL BRACCIOLIO

- Rimuovete le viti (1) posizionate sotto il cuscinetto (attraverso il tubo).
- Sostituite il cuscinetto con uno nuovo.
- Installate di nuovo le viti (1) e stringetele fermamente.

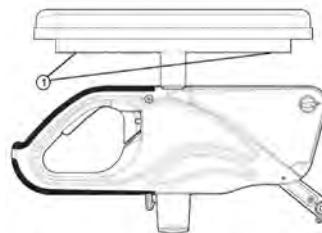

8.6.6 INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE DEI BRACCIOLI OSCILLANTI

- Rimuovete i due bulloni (1).
- Allineate il ricevitore del bracciolo con i fori di montaggio del telaio e l'ancora di fissaggio di transito.
- Installate di nuovo i bulloni e serrateli fermamente.

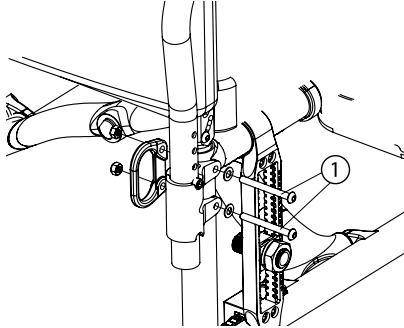

8.6.7 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA BRACCIOLI OSCILLANTI

- Estraete il bracciolo del ricevitore (1) (Fig. a).
- Rimuovete le viti (2) (Fig. b).
- Fate scorrere il dado dowel dentro il tubo del bracciolo con un cacciavite fino all'altezza desiderata (3).
- Installate di nuovo le viti (2)
- Installate di nuovo il bracciolo nel ricevitore.

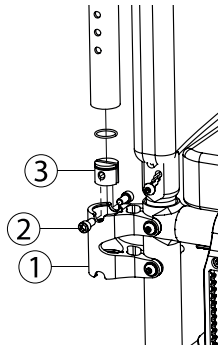


Fig. a


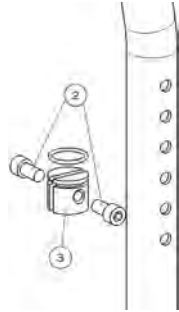


Fig. b

8.7 LUNGHEZZA DEL POGGIPIEDI/ANGOLAZIONE DELLA PEDANA


8.7.1 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL POGGIPIEDI

- Allentate la vite (1).
- Fate scorrere il tubo di estensione dentro l'alberatura anteriore fino alla lunghezza desiderata, entro i limiti.
- Stringete la vite (1) fermamente.

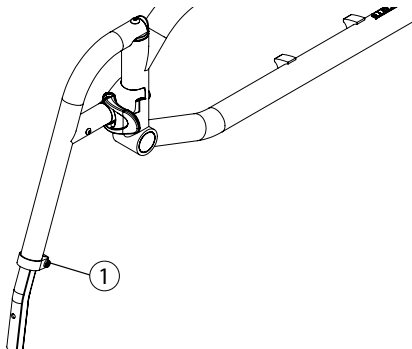


8.7.2 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL POGGIPIEDI (TIPO SCORREVOLE)

- Rimuovete le viti sull'alberatura anteriore (1).
- Fate scorrere il tubo di estensione dentro l'alberatura anteriore fino alla lunghezza desiderata.
- Installate di nuovo le viti (1) alla lunghezza desiderata.
- Stringete le viti fermamente.

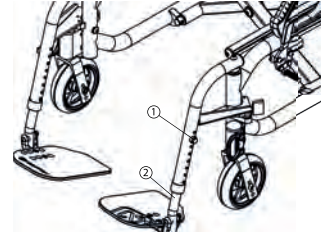

8.7.3 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL POGGIPIEDI (TIPO SINGOLA PEDANA)

- Allentare le viti esagonali inferiori da 5mm (1) sui morsetti di montaggio su rotelle destra e sinistra
- Fate scorrere il tubo di estensione dentro l'alberatura anteriore fino alla lunghezza desiderata, entro i limiti.
- Stringete la vite (1) fermamente.

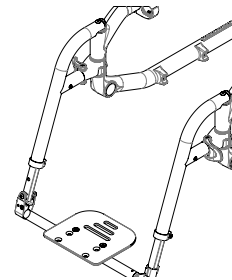


AVVERTENZA

Non rimuovere o svitare le viti di sicurezza (tipo a perno)

8.7.4 REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLA PEDANA

- Allentare la vite (1).
- Ruotare la pedana fino all'angolazione desiderata.
- Stringere bene la vite (1).

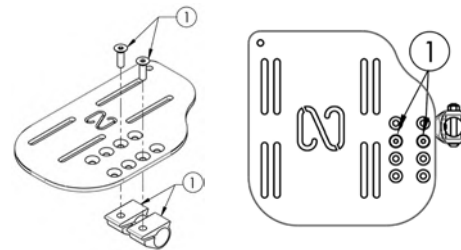

8.7.5 INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DEL SUPPORTO PER ARTI



AVVERTENZA

Non sedersi mai su un supporto per arti



INFORMAZIONI

Il supporto per arti non è disponibile sul modello VELOCE




INSTALLAZIONE

Fare riferimento all'installazione dei poggiatesta al punto 7.3 Alberature anteriori.

- Il supporto per arti può essere regolato orizzontalmente da sinistra a destra e in alto e in basso per l'altezza. Può anche essere posizionato più vicino o più lontano dal sedile regolandone l'angolazione.

- Per regolare l'allineamento orizzontale da sinistra a destra, allentare leggermente le viti (1), far scorrere il cuscino orizzontalmente nella posizione desiderata, quindi serrare le viti con una coppia di 7 Nm.
- Per regolare l'angolazione del supporto per arti, allentare leggermente le viti (1), posizionare il cuscino all'angolazione desiderata, quindi serrare le viti con una coppia di 7 Nm.
- Per regolare il supporto rispetto al sedile, allentare leggermente le viti sotto il cuscino (2), far scorrere il supporto nella posizione desiderata e quindi serrare saldamente le viti.
- Per ruotare la base orizzontalmente, allentare leggermente le viti (4) per poter ruotare il morsetto sull'asse principale. Ruotare il supporto per arti nella posizione corretta e serrare saldamente le viti in posizione con una coppia di 7 Nm.
- Per regolare l'altezza, allentare leggermente le viti (3) per consentire al morsetto di scorrere sull'asse verticale. Far scorrere il supporto per arti nella posizione desiderata, quindi serrare le viti con una coppia di 7 Nm.

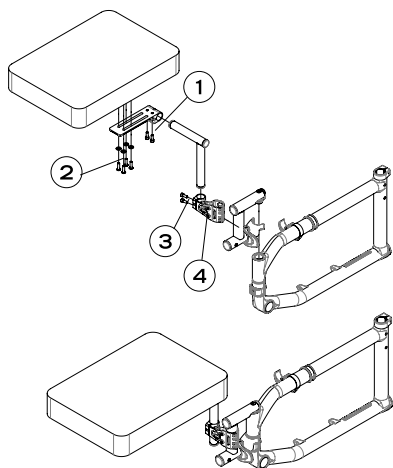

i **NOTA**
È più facile regolare un asse alla volta.

8.7.6 PULIZIA DEL SUPPORTO PER ARTI

Per pulire il supporto per arti, rimuovere il rivestimento e seguire le stesse istruzioni del punto 8.4.3 *Pulizia della sedia a rotelle* per il rivestimento del sedile e dello schienale.


8.8 SEDILE

Potrebbe essere difficile aprire la sedia a rotelle se la fodera è stata installata in maniera troppo stretta.

8.8.1 SOSTITUZIONE DELLA FODERA

IMBRACATURA SCORREVOLE

- Rimuovete il tappo di chiusura (1)
- Fate scorrere la nuova fodera.
- Installate di nuovo il tappo di chiusura (1).
- Regolate la tensione con il Velcro posizionato sotto la fodera.
- Aprite completamente la sedia e assicuratevi che la fodera sia tesa. Le guide del sedile devono chiudersi facilmente nei loro supporti.

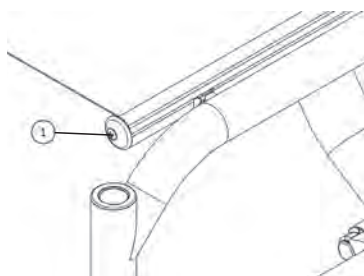

8.9 ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO



AVVERTENZA

Ogni modificazione dell'altezza sedile-pavimento comporta una regolazione del dispositivo di anti-ribaltamento, dell'angolo delle rotelle anteriori e della convergenza/divergenza delle ruote posteriori, se equipaggiate con una campanatura di 3° o 6°. È importante eseguire queste regolazioni prima di usare la sedia a rotelle, per ridurre il rischio di infortuni.

8.9.1 MODIFICAZIONE DELL'ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO ANTERIORE

Per modificare l'altezza sedile-pavimento anteriore, potete eseguire uno dei seguenti passaggi:

- Installare la rotella anteriore in un foro differente lungo la forcina.
- Installare una rotella con una taglia differente.
- Modificare la lunghezza del bullone stelo (Standard, +1" (2.5 cm) e +2" (5.0 cm) disponibili).
- Installare un bullone dello stelo differente (+0", +1", +2").

8.9.2 MODIFICAZIONE ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO POSTERIORE

Per modificare l'altezza sedile-pavimento posteriore, potete seguire uno dei seguenti passaggi:

- Installare la boccola dell'asse della sedia posteriore in una posizione differente lungo la piastra di montaggio.
- Installare ruote posteriori di taglia differente.

8.9.3 MODIFICARE L'ALTEZZA SEDILE-PAVIMENTO ANTERIORE

Per cambiare l'altezza sedile-pavimento anteriore e posteriore allo stesso momento, potete eseguire il seguente passaggio:

- Usare un altro cuscino per il sedile con uno spessore differente.

8.10 GRUPPI ROTELLE ANTERIORI, FORCELLE E STELO FORCELLE

8.10.1 RIMOZIONE/ISTALLAZIONE/RIPOSIZIONAMENTO DELLE ROTELLE ANTERIORI

- Allentate il dado (3) e rimuovetelo (1).
- Rimuovete, installate o riposizionate la rotella anteriore.
- Posizionate i distanziali (2) tra la rotella e la forcina.
- Stringete il dado (3) fermamente.



8.10.2 RIMOZIONE/ISTALLAZIONE/RIPOSIZIONAMENTO DELLE ROTELLE ANTERIORI (VELOCE)

- Allentate il dado (1) e rimuovetelo (1).
- Rimuovete, installate o riposizionate la rotella anteriore.
- Posizionate i distanziali (2) tra la rotella e la forcina.
- Stringete il dado (1) fermamente.




8.10.3 RIMOZIONE/ISTALLAZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO DELLE ROTELLE

DA DISINSTALLARE

- Rimuovete la vite (1).
- Rimuovete la vite (2).
- Fate scorrere l'alloggiamento delle rotelle dal telaio..

PER INSTALLARE DI NUOVO

- Fate scorrere la spina dell'alloggiamento delle rotelle nel telaio (3).
- Installate di nuovo l'alloggiamento (2).
- Installate di nuovo le viti (1).

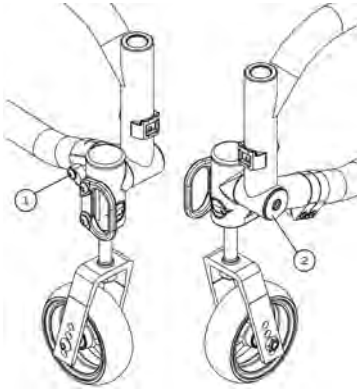

i INFORMAZIONI

Per cambiare il dado dello stelo o regolare i cuscinetti, rimuovete sempre l'alloggiamento della rotella dal telaio.

8.10.4 VELOCE TELAIO DELLA RUOTA

- Non rimuovere le viti di sicurezza.
- L'incantatore supporto è installato solo e regolata in movimento Composites



8.10.5 RIMOZIONE/ISTALLAZIONE DEL GRUPPO DADO DELLO STELO (TRANNE VELOCE)


RIMOZIONE DEL BULLONE

- Rimuovere la vite (1) e la rondella (2) mantenendo la forcella.
- Rimuovere il gruppo rotelle, forcelle e bulloni.
- Rimuovere la protezione antipolvere (9).
- Potrebbe essere necessario rimuovere la rotella per eliminare il bullone (7).
- Rimuovere il controdado (8) mentre si sorregge il bullone (7) usando una chiave.
- Rimuovere la forcella ed eseguire la manutenzione, se risulta necessario.

ISTALLARE IL BULLONE

- Fare riferimento al diagramma per assicurarsi che il gruppo sia installato nell'ordine giusto.
- Inserire il bullone (7) nella forcella (non mostrata qui) e stringere il controdado (8) mentre si sorregge il bullone stesso (7) usando una chiave.

- Far scorrere la protezione antipolvere (9) nel bullone (7).
- Inserire il gruppo rotelle, forcelle e bulloni attraverso l'alloggiamento corrispondente (6).
- Stringere la vite (1) e la rondella (2) mentre si sorregge la forcella (non mostrata) dal fondo per evitare la rotazione della forcella.
- Regolare l'attrito del bullone ruotando la vite di regolazione (3).

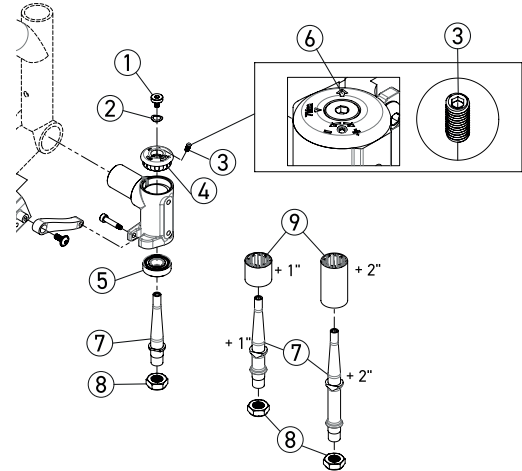

i INFORMAZIONI

La vite di regolazione è usata per aggiungere attrito sul bullone e ridurre la vibrazione delle rotelle.



AVVERTENZA

Evitare di stringere troppo la vite. Lo stringimento eccessivo delle viti potrebbe danneggiare il sistema anti-vibrazione.


8.10.6 REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELL'ALLOGGIAMENTO DELLE ROTELLE



AVVERTENZA


I punti di fissaggio di transito devono rimanere nelle loro posizioni originali. Questi sono stati progettati per essere utilizzati con la loro posizione originale rivolta in avanti. Non ruotare i punti di fissaggio in avanti.

- Tutte le 4 ruote devono toccare il pavimento
- Usare una squadra e posizionarla sul pavimento lungo l'alloggiamento delle rotelle.
- L'alloggiamento deve essere parallelo alla squadra.
- Se l'alloggiamento non è parallelo alla squadra, rimuovete le viti (4) e allentate il bullone del perno (3).
- Ruotate l'alloggiamento delle rotelle per regolare l'angolo mentre fate scivolare il morsetto (5) sul telaio.
- Stringete la vite (3). Questo sorreggerà l'alloggiamento delle rotelle in posizione.
- Controllate ancora che l'alloggiamento delle rotelle sia perpendicolare al pavimento usando la squadra.
- Installate di nuovo le due viti (4) nel morsetto (5).
- Stringete le viti (4) finché non sono perfettamente adattate.
- Il serraggio finale deve essere eseguito manualmente.

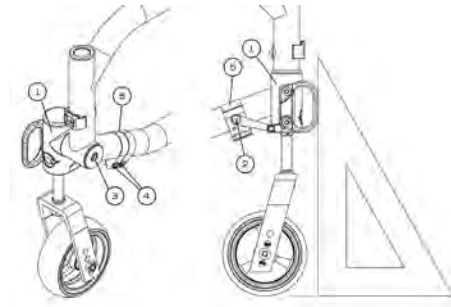

8.10.7 MOVE TELAIO DELLA RUOTA

- Tutte le 4 ruote devono toccare il pavimento.
- Usate una squadra e posizionatela sul pavimento lungo l'alloggiamento delle rotelle.
- L'alloggiamento deve essere parallelo alla squadra.
- Se l'alloggiamento non è parallelo alla squadra, svitate le viti (2) sufficientemente da rimuovere gli inserti eccentrici (3) dall'alloggiamento delle rotelle (1).
- Ruotate l'alloggiamento delle rotelle per regolare l'angolo.
- Posizionate gli inserti eccentrici (4) nell'alloggiamento e stringete le viti (2).
- Controllate ancora che l'alloggiamento delle rotelle sia perpendicolare al pavimento usando la squadra.
- Il serraggio finale deve essere fatto manualmente.

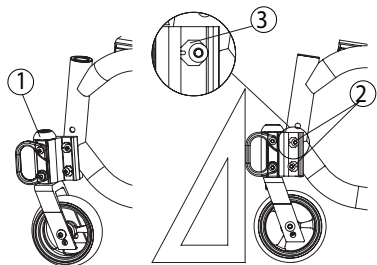

8.10.8 VELOCE REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELL'ALLOGGIAMENTO DELLE ROTELLE

- Tutte e quattro le ruote devono toccare il pavimento.
- Utilizzare il livello integrato sul corpo forcella.
- Se l'alloggiamento caster non è in piano, allentare le viti (1)
- Ruotare l'alloggiamento caster per regolare l'angolo fino a quando la bolla è centrata nel livello.
- Serrare le viti (1). Questo tenere la posizione custodia caster.
- Controllare nuovamente il livello integrato per assicurarsi che l'alloggiamento caster è perpendicolare al suolo



8.11 RUOTE POSTERIORI


8.11.1 REGOLAZIONE GLI ASSI A SGANCIO RAPIDO

- Rimuovete la ruota posteriore dalla sedia.
- Dietro il pulsante a sgancio rapido c'è un dado che regola l'altezza dell'asse.
- Mantenete l'asse con una chiave dall'altra estremità (vicino alle sfere di arresto) (Fig. 33) e girate il dado dietro il pulsante di sgancio rapido per modificare la lunghezza dell'asse.
- Installate lo sgancio rapido nella boccola dell'asse sulla sedia a rotelle.
- Le sfere di arresto a sgancio rapido devono estendersi oltre la boccola dell'asse per avere un blocco sicuro.




8.11.2 SOSTITUZIONE/REGOLAZIONE ANELLI CORRIMANO

- Sulla ruota Newton One, lo pneumatico può rimanere in posizione.
- Usate uno strumento di rimozione in plastica per rimuovere la gomma (1) (Fig. 34).
- Rimuovete tutte i dadi (2) dentro l'anello (3).
- Sostituite l'anello corrimano (4) con uno nuovo e allineate i fori di montaggio (5).
- Installate di nuovo i dadi e stringeteli saldamente.
- Installate di nuovo la gomma sull'anello.

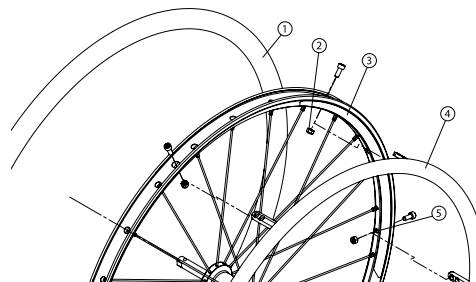


8.11.3 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ASSE POSTERIORE

- Allentate il dado che mantiene la boccola dell'asse (3)
- Spostate la boccola dell'asse (1) lungo la piastra di fissaggio (2).
- Installate di nuovo la boccola nel foro di montaggio desiderato e stringete il dado (3)

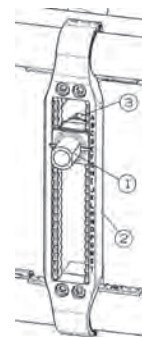

8.11.4 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ASSE POSTERIORE (MOVE, A6)

- Rimuovete il dado (3) che mantiene la boccola dell'asse.
- Spostate la boccola dell'asse (1) lungo la piastra di fissaggio (2).
- Installate di nuovo la boccola nel foro di montaggio desiderato e stringete il dado (3)

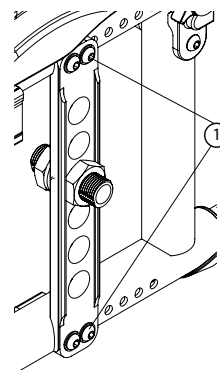


AVVERTENZE

L'altezza e la profondità del sedile, l'angolo posteriore, il sistema di seduta/fodera, la taglia/posizione delle ruote posteriori, la taglia/posizione delle rotelle anteriori, e le con-

dizioni dell'utente influenzano direttamente la stabilità della sedia a rotelle. Qualsiasi modifica di uno di questi fattori può causare un decremento della stabilità. Queste regolazioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato. Le altezze sedile-pavimento hanno delle posizioni specifiche che dipendono dalla taglia e la posizione delle ruote posteriori, dalla taglia e dalla posizione delle rotelle anteriori e dall'angolo sedile-pavimento. Queste regolazioni DEVONO essere eseguite da un tecnico qualificato

8.11.5 REGOLAZIONE SPAZIATURA RUOTE POSTERIORI


- Le ruote posteriori possono essere regolate lateralmente riposizionando la boccola dell'asse (1) sulla piastra di montaggio (2).
- Allentate i dadi (3) sulla boccola dell'asse (1).
- Girate la boccola (1) della direzione desiderata per regolare la spaziatura.
- Stringete i dadi saldamente (3).
- Il dado può essere spostato da un lato all'altro per una maggiore regolazione.

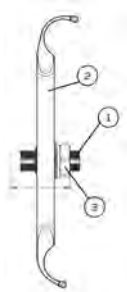

8.11.6 SOSTITUZIONE DELLA CAMPANATURA POSTERIORE


PIASTRA DI MONTAGGIO V2 PER MICROREGOLAZIONE

- Notare la posizione della piastra frontale (4) sulla piastra di montaggio
- Rimuovere il dado (1) e la rondella di sicurezza (2) trattenendo la boccola dell'asse (3)
- Rimuovere la boccola dell'asse (3) lungo la piastra frontale (4)
- Sostituire o sostituire la boccola del 3° asse (3)
- Sostituire o sostituire la piastra frontale di montaggio 0° o 3° (4) per raggiungere un angolo di 3° o 6°
- Reinstallare la boccola dell'asse, la piastra frontale di montaggio, la rondella di sicurezza e il dado nella posizione desiderata sulla piastra di montaggio V2
- Regolare la convergenza / inclinazione delle ruote posteriori (vedere la sezione 8.11.5)
- Stringere il dado (1) della piastra di montaggio sul lato destro e sinistro della sedia a rotelle

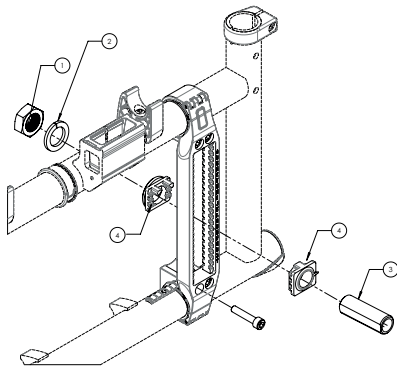


PIASTRA DI MONTAGGIO T2 STANDARD

- Notare la posizione della boccola dell'asse (3) sulla piastra di montaggio
- Rimuovere i 2 dadi (1) e la rondella di sicurezza che trattiene la boccola dell'asse (3)
- Rimuovere la boccola dell'asse (3)
- Sostituire o sostituire la boccola del 3° asse (3)
- Reinstallare la boccola dell'asse, la rondella di sicurezza e il dado nella posizione desiderata sulla piastra di montaggio V2
- Regolare la convergenza della convergenza delle ruote posteriori (vedere la sezione 8.11.5)
- Stringere il dado (1) della piastra di montaggio sul lato destro e sinistro della sedia a rotelle

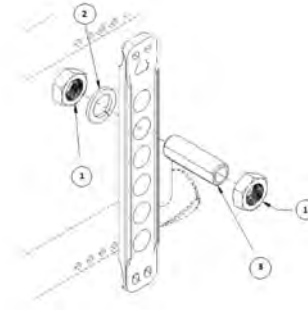

8.11.7 REGOLAZIONE DELLA CONVERGENZA/DIVERGENZA CON LA CAMPANATURA DELLE RUOTE POSTERIORI

- Rimuovete la ruota posteriore.
- Mantenete la sedia su un piano orizzontale con il supporto delle altre tre ruote.
- Allentate i dadi (1) mentre mantenete un po' di tensione.
- Mettete l'attrezzo di regolazione della campanatura sulla boccola dell'asse.
- Usate una squadra e ruotate la boccola dell'asse in modo che l'attrezzo sia parallelo alla squadra (e perpendicolare al pavimento).
- Con una mano mantenete l'attrezzo e la piastra di montaggio insieme per conservare l'impostazione.
- Con l'altra mano, usate un cricchetto per serrare saldamente il dado (1) rivolto verso l'interno della sedia.

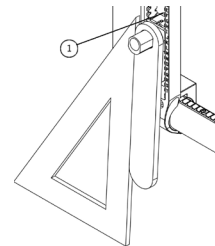


8.11.8 REGOLARE IL CENTRO DI GRAVITÀ

- Rimuovere la ruota posteriore.


PIASTRA DELL'ASSE MICROREGOLABILE (A7, C2, XC2, VELOCE)

- Rimuovere i 4 bulloni (1) sulla piastra dell'asse
- Spostare la piastra dell'asse nella posizione desiderata
- Reinserrire i 4 bulloni (1) sulla piastra dell'asse e stringerli con una coppia di serraggio di 12 Nm

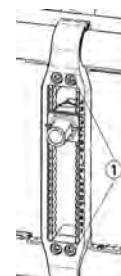

PIASTRA DELL'ASSE STANDARD (MOVE E A6)


- Rimuovere i 4 bulloni (1) sulla piastra dell'asse
- Spostare la piastra dell'asse nella posizione desiderata
- Reinserrire i 4 bulloni (1) sulla piastra dell'asse e stringerli con una coppia di serraggio di 7 Nm.

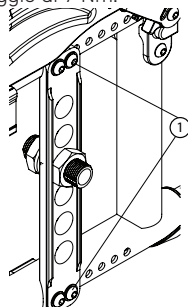

8.12 FRENI

8.12.1 SOSTITUZIONE/REGOLAZIONE DEI FRENI


- Allentate le viti (1).
- Fate scivolare il freno nella posizione desiderata.
- Stringete le viti (1) fino a che non sono perfettamente adattate. Il serraggio finale deve essere fatto manualmente.
- Una volta impegnati, i freno devono entrare per 3 mm nella gomma.

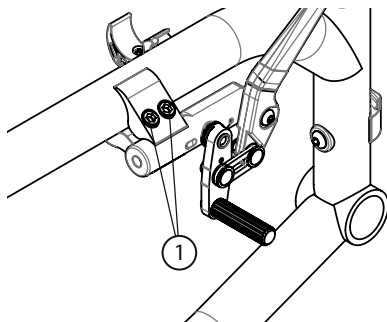

8.13 ESTENSIONI DEI FRENI

8.13.1 SOSTITUZIONE/REGOLAZIONE DELLE ESTENSIONI DEI FRENI

- Allentate la vite (1).
- Allineate l'occhiello (2) con il foro di montaggio.
- Stringete di nuovo la vite (1) sulla leva di bloccaggio.

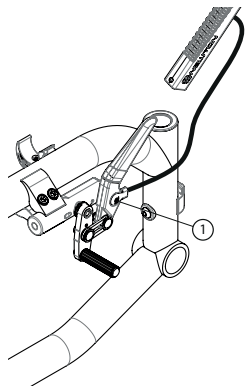

8.14 ANTI-RIBALTAMENTO


8.14.1 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



AVVERTENZA

L'anti-ribaltamento DEVE essere usato con la sedia in qualsiasi momento. Dato che i dispositivi anti-ribaltamento sono un'opzione in alcuni mercati, Motion Composites raccomanda vivamente di ordinarli sempre in quanto questi sono importanti strumenti di sicurezza per l'utente. Usate sempre i dispositivi anti-ribaltamento.

- Il dispositivo di anti-ribaltamento deve essere tra 40 e 51 mm dal pavimento. Una spaziatura impropria potrebbe causare intoppi quando si passano gli ostacoli sulla strada o potrebbe impedire un corretto funzionamento dell'anti-ribaltatura.
- Premete il pulsante (1) e fate scorrere le estensioni dell'anti-ribaltamento alla lunghezza desiderata.
- Assicuratevi che il pulsante scatti in posizione.

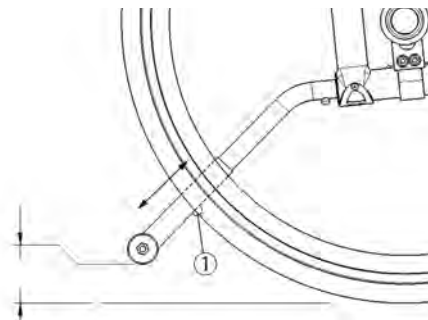

INFORMAZIONI


Se non riuscite a regolare il dispositivo anti-ribaltamento nella lunghezza appropriata, contattate il vostro rivenditore Motion Composites per sostituirlo con un altro di un'altra taglia.

8.14.2 LEVA AUSILIARIA

- L'assistente può inclinare la sedia a rotelle più facilmente per superare ostacoli con un dispositivo di ribaltamento
- Tenere la sedia a rotelle per le maniglie di spinta.
- Premere la leva del cassone ribaltabile con il piede e tenere la sedia a rotelle in posizione inclinata fino a superare l'ostacolo.

INSTALLAZIONE

- Premere il pulsante sugli anti-ribaltamento per rimuoverli
- Inserire l'ausilio ribaltabile premendo il pulsante e facendolo scorrere in posizione

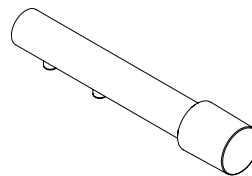

ATTENZIONE!

Rischio di ribaltamento!


Reinstalla sempre gli anti-ribaltamento quando non sono in uso gli accessori per ribaltamento.

8.15 KIT E SUPPORTO POGGIATESTA

8.15.1 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO POGGIATESTA


- Deve essere installato solo sulle maniglie di spinta HD.
- Tagliate l'estremità del manico per spingere con un coltello in

- modo da vedere la parte interna del manico stesso.
- Inserite il dado da presa da 1/4"-20 (1) con un attrezzo di inserimento (2) nel manico (40 mm).
- Istituite il dispositivo di fissaggio del supporto poggiatesta stringendolo nella spina elastica da 1/4"-20.

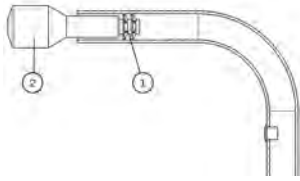

8.15.2 INSTALLAZIONE DEL KIT POGGIATESTA


- Una volta che avete installato il supporto, inserite il poggiatesta regolabile nel ricevitore orizzontale.
- Istituite il poggiatesta nel perno a sfera e stringete le tre viti (1).
- Una volta che avete completato la regolazione, stringete saldamente tutte le parti.

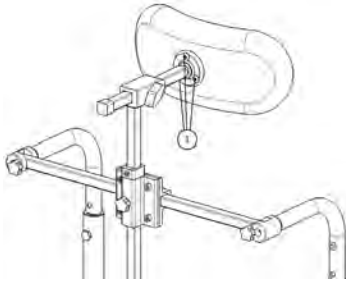

8.16 PIASTRA ASSE PER AMPUTATO

8.16.1 INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA ASSE PER AMPUTATO


- Istituite la piastra di montaggio (1) chiudendo i morsetti intorno al telaio.
- Inserite un secondo ricevitore (2) sulla piastra dell'asse.
- Istituite il morsetto posteriore (3) nella parte posteriore del telaio.
- Inserite due boccole (8) attraverso la piastra dell'asse (1) e nel ricevitore (2) e fissatele con un bullone e una rondella (4) (5).
- Inserite due viti (7) nella piastra asse per amputato attraverso il morsetto di montaggio e stringetele.
- Inserire la boccola dell'asse (8) attraverso la piastra per amputato e stringete i dadi (9).

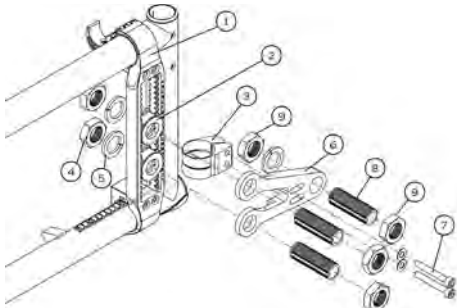

8.16.2 PIASTRA ASSE PER AMPUTATO MOVE / A6

- Istituite la piastra di montaggio (1) serrandola al telaio.
- Istituite il morsetto posteriore (2) sul lato posteriore del telaio.
- Inserite i 4 adattatori della piastra per amputato (3) sulla piastra di montaggio (1) nella posizione desiderata.
- Inserite i bulloni (4) e le rondelle nel morsetto posteriore (2) attraverso la piastra per amputato (6) e poi stringete.

- Inserite la boccola dell'asse (7) attraverso la piastra per amputato e inserite i bulloni (8) e la rondella di fissaggio (9).
- Inserite i due bulloni (10) attraverso la piastra di montaggio e la piastra per amputato (1 e 6) e stringete con i dadi di bloccaggio (11)

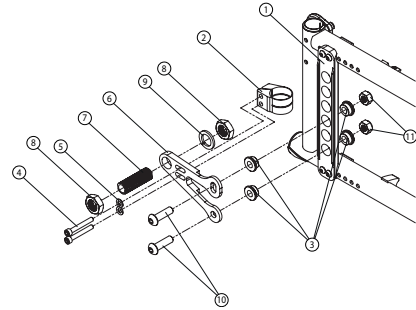

8.17 USO DEL SERVIZIO TRASPORTO PER DISABILI



AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di infortuni, Motion Composites raccomanda di non farsi trasportare in un veicolo quando si è seduti sulla sedia.

Motion Composites riconosce che l'opzione di trasporto più sicura per una persona su una sedia a rotelle è quella di trasferire la persona sul sedile del veicolo e di utilizzare il sistema di ritenuta del veicolo a motore. Motion Composites non può e non raccomanda nessun sistema di trasporto sulla sedia a rotelle.

La cintura di posizionamento standard della sedia a rotelle non deve mai essere utilizzata come cintura di sicurezza quando si è seduti in un veicolo per il trasporto di disabili.

Le norme di trasporto potrebbero variare a seconda della legislazione, dello stato, della provincia o del paese preso in considerazione. Usare solo un sistema di sicurezza approvato dalla legislazione locale. Per evitare il rischio di lesioni, rimuovere tutti gli oggetti o gli accessori dalla sedia a rotelle e riporla in modo sicuro all'interno del veicolo.



AVVERTENZA

Assicurarsi che la sedia sia stata realizzata con l'Opzione Transit installata.

Se la sedia non è equipaggiata con l'Opzione di Trasporto:

1. Non permettere a nessuno di sedersi sulla sedia mentre si è a bordo di un veicolo in movimento.
 - a. spostare sempre l'utente su una sedia del veicolo omologata.
 - b. Assicurare sempre l'utente con i sistemi di sicurezza adeguati sul veicolo di trasporto.
2. Durante un incidente o una fermata improvvisa, l'utente potrebbe essere gettato via dalla sedia. Le cinture di posizionamento della sedia a rotelle non lo impediscono, inoltre le cinture o le cinghie potrebbero causare ulteriori lesioni.
3. Non trasportare mai la sedia a rotelle ponendola sul sedile anteriore del veicolo. Questo potrebbe creare problemi al conducente.
4. Assicurare sempre la sedia, in modo che non possa rotolare o in ogni caso spostarsi.
5. Non usare mai una sedia che sia stata coinvolta in un incidente automobilistico. Il mancato rispetto di questi avvertimenti porta a cadute, ribaltamenti e perdite di controllo che potrebbero causare gravi lesioni all'utente o alle persone intorno.

La mancata osservanza di queste avvertenze può causare danni alla sedia, caduta, ribaltamento o perdita di controllo oltre a causare gravi lesioni all'utente o ad altri.



ATTENZIONE

Se la sedia a rotelle è equipaggiata con i sistemi di sicurezza WC-19 Transit Tie-Down di Motion Composites, si raccomanda di leggere la relativa guida alla fine di questo manuale.

11. GARANZIA LIMITATA MOTION COMPOSITES

Fare riferimento al documento di garanzia di Motion Composites.



AVVERTENZA

Nota importante riguardo ai diritti dei consumatori. I vantaggi inclusi in questa garanzia del produttore si aggiungono a, e non escludono, eventuali diritti e rimedi spettanti all'acquirente in base alle leggi locali sulla tutela dei consumatori.

Questa garanzia del produttore è governata dalle leggi del paese, provincia, stato o territorio in cui il consumatore ha acquistato il prodotto Motion Composites. In molti paesi, i consumatori godono di diritti statuari in base alle leggi locali. Tali diritti possono variare tra paesi, territori, stati o province diversi, e spesso non possono essere esclusi. Questa garanzia del produttore non è intesa a:

- modificare o escludere alcun diritto statuario del consumatore che non possa essere modificato o escluso legalmente; oppure
- limitare o escludere eventuali diritti del consumatore nei confronti della persona che gli ha venduto il prodotto Motion Composites, se tale persona ha violato il contratto di vendita.

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ

L'unico obbligo di Motion Composites e l'unico rimedio che avete ai sensi di questa garanzia sarà limitato alla riparazione e/o alla sostituzione del prodotto.

SERVIZIO DI GARANZIA

Se la sedia richiede un servizio di garanzia, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore autorizzato in Canada o un distributore internazionale autorizzato. Nel caso si verificasse un difetto nei materiali o nella lavorazione, il rivenditore o il distributore devono ottenere un numero di autorizzazione di restituzione (return authorization - RA) da Motion Composites. Motion Composites rilascia numeri RA solo a rivenditori e distributori autorizzati. Nel caso in cui non riceviate un servizio di garanzia soddisfacente, vi preghiamo di scrivere direttamente al servizio clienti Motion Composites al seguente indirizzo:

Motion Composites Inc.
160 Armand Majeau Sud, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Quebec, Canada J0K 3H0

Telefono: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555

support@motioncomposites.com
motioncomposites.com

o in alternativa potete inviare un messaggio al seguente indirizzo email: service@motioncomposites.com



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non restituiteci prodotti senza il nostro previo consenso.



AVVISO PER IL CONSUMATORE

1. La presente garanzia è esclusiva, e in sostituzione di tutte le garanzie, sia scritte che orali, espresse o implicite. Motion Composites non è responsabile di nessun danno diretto o indiretto. Registrando la vostra sedia a rotelle Motion Composites, automaticamente date il vostro assenso a tutte le disposizioni presenti in questa garanzia.
2. E' proibito alterare o estendere questa garanzia o rinunciare a una delle limitazioni o esclusioni.

10. DANNI PARTICOLARI

10.1 I DANNI CHE RICIEDONO UN SERVIZIO DA UN AGENTE QUALIFICATO

Se osservate una delle condizioni seguenti, la sedia a rotelle deve essere gestita da un agente di servizio qualificato:

- Qualsiasi regolazione delle ruote;
- Qualsiasi cuscinetto a sfera difettoso nelle forchine;
- Qualsiasi cuscinetto a sfera delle ruote anteriori.

10.2 DANNI SPECIALI CHE RICHIEDONO IL RITORNO DELLA SEDIA AL PRODUTTORE

Se osservate una delle seguenti condizioni, contattate sempre il vostro agente di servizio prima di inviare la sedia a Motion Composites per la riparazione.

- Si è spaccata una parte del telaio o della traversa;
- Si è danneggiato il filo del dado a rivetto;
- Si è rotta una parte del telaio o della traversa;
- Si è consumata la traversa;

I problemi continuano a essere riscontrati dopo che sono state eseguite diverse regolazioni o riparazioni da un agente di servizio qualificato.

10.3 PROCEDURA DI RIPARAZIONE

Le parti che possono essere riparate dal proprietario:

GOMMA POSTERIORE E CAMERA D'ARIA

- Le parti gestite dal produttore o da un centro di assistenza:
 - a. Tutte le parti della sedia tranne le gomme e le camere d'aria
 - b. Le parti che possono essere rimosse e inviate al produttore/distributore o a terze parti per la riparazione:
 - c. Ruote, braccioli, poggiatesta, fodera, cuscino
 - d. Circostanze nelle quali la sedia deve essere inviata al servizio di assistenza:
 - e. Cuscinetti rotti, raggi allentati, ruote non allineate, bulloni allentati, vibrazioni anormali, rumore o qualsiasi deviazione del telaio, stelo anteriore che non è perpendicolare al pavimento, parti rotte come il dispositivo anti-ribaltamento, canne posteriori, strappi e lacerazioni della fodera e in occasione di controlli annuali.
- Vi preghiamo di contattare il nostro agente servizio clienti per ottenere la lista completa dei distributori e i centri di servizio: www.motioncomposites.com
- Alcuni rivenditori possono offrire unità di sostituzione durante il periodo di servizio. Vi preghiamo di contattare il vostro agente di servizio per avere maggiori dettagli. Motion Composites terrà le parti di ricambio per almeno 10 anni o proporrà una soluzione alternativa compatibile.
- Se la sedia deve essere inviata al centro di servizio o al produttore per la riparazione, questa deve essere accuratamente imballata in una scatola di cartone che si adatta alle sue dimensioni. Il dispositivo di anti-ribaltamento, il poggiatesta e il cuscino devono essere rimossi e imballati in una piccola scatola dentro quella più grande contenente la sedia a rotelle. La sedia deve essere protetta con una pellicola protettiva per prevenire graffi e usura.

10.4 ATTREZZI

CHIAVI A BRUGOLA CHIAVI
2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm

CHIAVI
10 mm - 11 mm - 1/2" (13 mm)

A SGANCIO RAPIDO
7/16" (11 mm) - 3/4" (19 mm) - 26 mm

ALTRI
Chiave inglese - Cacciavite a stella

11. MANUTENZIONE E LISTA CONTROLLI DI SICUREZZA

AD OGNI USO

- Assicuratevi che la sedia rotoli facilmente e dritto. Controllate le vibrazioni, i rumori o qualsiasi deviazione dal normale funzionamento.
- Inoltre assicuratevi che la sedia funzioni in modo appropriato e che lo stelo anteriore sia perpendicolare al pavimento.
- Controllate le gomme (anteriori e posteriori) per vedere se sono usurate e per vedere se ci sono detriti, se la pressione è bassa o se ci sono punti piatti.
- Assicuratevi che lo sgancio rapido della ruota siano innestati e bloccati correttamente.
- Assicuratevi che lo sgancio rapido della ruota siano innestati e bloccati correttamente.
- Assicuratevi che i tubi anti-ribaltamento sono fissati in posizione (se presenti).
- Controllate la fodera per vedere se ci sono protuberanze di metallo, strappi o lacerazioni.
- Assicuratevi che le maniche non siano allentate (se presenti).
- Controllate gli anelli corrimano per vedere se ci sono bordi grezzi e assicuratevi che non ci sia olio o altri contaminanti.
- Controllate se ci sono interferenze di altri componenti o rumori anomali.

SETTIMANALMENTE

- Controllate la pressione delle gomme con un manometro.
- Controllate la tensione della fodera del sedile – questa deve essere dritta quando la sedia è aperta e disposta in posizione.

MENSILMENTE

- Controllate gli allineamenti delle ruote.
- Controllate se i cuscinetti delle forcine si muovono liberamente.
- Controllate bulloni e viti e serrare alla coppia corretta, se necessario.

ANNUALMENTE

- Fate fare un'ispezione completa della vostra sedia da un tecnico qualificato.

i INFORMAZIONI RILEVANTI

La pressione delle ruote deve essere regolata dal proprietario o dal suo assistente usando attrezzi appropriati. Se una parte sembra non funzionare in modo appropriato dopo l'ispezione, la sedia deve essere inviata immediatamente a un tecnico qualificato per la dovuta riparazione.

i INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO

In caso di cessione, restituire il dispositivo al rivenditore o centro di riabilitazione. Tutti i componenti del prodotto devono essere smaltiti e riciclati in conformità con le leggi e le norme ambientali nazionali.

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DEL PRODOTTO

Motion Composites
160 Armand Majeau, sud, St-Roch-de-l'Achigan
Quebec, Canada J0K 3H0

Telefono: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555

support@motioncomposites.com
motioncomposites.com

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

Con il presente documento dichiariamo che i dispositivi menzionati in seguito sono stati classificati secondo le regole di classificazione e sono conformi ai Principi Essenziali per la Sicurezza e le Prestazioni, come previsto nella Regolamentazione Europea dei Prodotti Sanitari (Dispositivi Medici) 93/42/CEE.

DISPOSITIVO (I) MEDICO(I)

Motion Composites Helio C2, A7, A6, Veloce, Move, Kids, Xc2 sedia a rotelle manuale

SITO DEL PRODUTTORE:

Motion Composites
160 Armand Majeau sud
Saint-Roch-de-l'Achigan
Quebec, Canada J0K 3H0

CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO

Classe 1 Dispositivo Medico (per 93/42/CCE).

NORME APPLICATE

- NF EN ISO 7176-1
Sedie a rotelle, parte 1: determinazione abilità statica.
- NF EN ISO 7176-5
Sedie a rotelle, parte 5: determinazione delle dimensioni, la massa e lo spazio di manovra.
- NF EN ISO 7176-8
Sedie a rotelle, parte 8: requisiti e test per l'impatto statico e la resistenza alla fatica.
- NF EN ISO 7176-11
Sedie a rotelle, parte 11: Test con i manichini.
- NF EN ISO 7176-15
Sedie a rotelle, parte 15: requisiti per la divulgazione delle informazioni, la documentazione e l'etichettatura.

Questa dichiarazione di conformità è valida dal 16 Gennaio 2013.



WC-19 SISTEMA DI SICUREZZA TRANSIT TIE-DOWN



AVVERTENZA

Leggere tutte queste pagine prima di usare il sistema Transit Tie-Down.

Usate solamente attrezzature appropriate come indicato

Usate solamente sistemi di sicurezza e sistemi di seduta originali

Usare sistemi tie down adeguati/altri sistemi sicuri

Evitate di usare attrezzature inadatte e non sicure

Le informazioni seguenti si riferiscono a sedia a rotelle equipaggiata con un sistema transit tie down WC-19. Leggete queste informazioni completamente prima di usare un veicolo di trasporto. Se avete domande sulle informazioni fornite o sull'uso della sedia come sedile di un veicolo di trasporto, vi preghiamo di contattare il vostro specialista autorizzato..



AVVERTENZA

EVITARE L'USO DI ATTREZZATURE NON ADEGUATE /O ALTRE ATTREZZATURE NON SICURE IN UN VEICOLO A MOTORE

1. INTRODUZIONE

Sedia a rotelle è disponibile con il sistema SC-19 Transit Tie-Down. Questo sistema è offerto solo come opzione installata in fabbrica.

Il sistema Transit Tie-Down è stato testato secondo la regolamentazione RESNA WC-4:2012, sezione 19 ("WC19") e la regolamentazione , per il test di impatto frontale, con un manichino da 169.4 libbre (77 kg) corrispondente ad un range di peso tra 115 e 210 libbre (52.16 - 95.25 kg). Il pacchetto Transit Tie-Down è conforme alle norme riguardanti la sicurezza delle sedie a rotelle in certi tipi di veicoli di trasporto. L'opzione consiste in 4 staffe e una cintura pelvica installata in fabbrica con 2 staffe di montaggio su un telaio standard. L'opzione di ancoraggio WC-19 Transit consiste di quattro staffe di ancoraggio installate in fabbrica, una cintura pelvica installata in fabbrica con 2 staffe di montaggio su un telaio standard. È approvato per l'uso in transito OCCUPATO. Prima di tutto, WC-19 serve a testare solo le prestazioni della sedia quando questa, assicurata in una posizione rivolta in avanti, viene coinvolta

in collisioni di impatto frontale alla velocità di 30 mph (48 km/h). La sedia non è stata testata per altri tipi di collisioni, incluso (e senza limitazioni) impatti laterali, impatti posteriori, rovesciamenti o impatti frontali ad alta velocità.

In secondo luogo, la conformità con WC-19 non garantisce l'occupante contro possibili infortuni, anche a velocità di impatto frontale inferiori a 30 mph (48 km/h). Infatti, in questi tipi d'impatti le forze sono estreme e gli infortuni possono accadere anche se la sedia funziona esattamente come richiesto dalle regolamentazioni.

Di conseguenza, WC-19 e ANSI/ RESNA WC/19 contengono numerose avvertenze riguardo gli effetti che l'utente potrebbe subire, se si trasferisce su un sedile di un veicolo di trasporto e usa i sistemi di sicurezza installati a bordo ogni volta che questo è possibile.

E' anche disponibile un'opzione di trasporto personalizzata per la sedia non occupata con i modelli Helio C2, Helio A6 Helio A7, Helio XC2, Helio Kids, Veloce e Move. Questa opzione personalizzata non è stata testata secondo le regolamentazioni WC-19, include solo 4 staffe Tie-Down ed è approvata solo per il trasporto di una sedia non occupata.

Per determinare se la Sedia a rotelle presenta l'opzione WC-19 Transit Down o l'opzione di trasporto, consultate la Sezione 3. *Panoramica del prodotto.*

Se avete domande circa l'uso della sedia per sedersi in un veicolo di trasporto, dovete contattare il servizio clienti Motion Composites ai numeri 1-866-650-6555.

Non modificate la vostra sedia in nessun modo usando un centro non autorizzato. Non effettuate nessuna alterazione o sostituzione alle parti strutturali o ai componenti del telaio senza consultare Motion Composites

2. ETICHETTATURA

ETICHETTA POSTERIORE



LEGGETE

Leggete e seguite le informazioni nel manuale e tutte le informazioni supplementari fornite con la sedia prima dell'uso

ETICHETTATURA WC-19 LABEL



WC-19

Indica che la sedia testata e approvata, con sistemi di seduta similmente etichettati, testati e approvati, è conforme alla regolamentazione ANSI/RESNA WC/ Vol. 4, Sezione 19 per il trasporto di una sedia occupata su un veicolo a motore.

ETICHETTA DI FISSAGGIO



FISSAGGIO WC-19

Indica che i punti di fissaggio della sedia sono conformi alla regolamentazione ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Sezione 19.

ETICHETTA DI AVVERTIMENTO



AVVERTIMENTO

Indica una potenziale condizione/situazione di pericolo. La mancata osservanza delle procedure previste può causare infortuni personali, danni ai componenti o malfunzionamenti. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo nero su un triangolo giallo con un bordo nero.

ETICHETTA OBBLIGATORIO



OBBLIGATORIO

Queste azioni devono essere eseguite come specificato. La mancata esecuzione di queste azioni obbligatorie può causare infortuni personali e/o danni alle apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo bianco su un punto blu con un bordo bianco.

ETICHETTA VIETATO**VIETATO**

Queste azioni sono vietate. Esse non devono essere eseguite in nessun momento e in nessuna circostanza. L'esecuzione di un'azione proibita può causare infortuni e/o danni alle apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo nero con un cerchio e una barra rossa.

ETICHETTA IMPORTANTE**IMPORTANTE**

Indica informazioni importanti da ricordare quando usate il prodotto.

3. DEFINIZIONE**ANSI/RESNA**

American National Standards Institute/ Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America

ISO

International Standards Organization Transit

PACCHETTO TIE-DOWN:

attrezzature installate sulla sedia che permettono di ancorarla su un veicolo a motore. L'attrezzatura di ancoraggio per il transito di Motion Composites è composta da quattro punti di ancoraggio e una cintura pelvica..

WHEELCHAIR TIE-DOWN AND OCCUPANT RESTRAINT SYSTEM (WTORS)

Attrezzatura installata su un veicolo a motore che permette alla sedia a rotelle e/o all'occupante seduto di essere ancorati al veicolo stesso per limitare i possibili movimenti durante un incidente. L'attrezzatura consiste di un dispositivo per assicurare la sedia e un sistema di cinture di sicurezza.

PUNTI DI FISSAGGIO

Specifici punti strutturali sulla base della sedia o sul telaio del sedile che sono stati progettati per l'attaccamento del sistema WTORS. Questi punti sono indicati dai simboli di ancoraggio.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE

L'utente deve trasferirsi sul sedile del veicolo a motore e utilizzare i sistemi di sicurezza installati se e quando possibile. La sedia deve essere riposta e assicurata nel veicolo. Se a discrezione dell'utente si ritiene necessario assicurare la sedia al veicolo, quest'ultimo deve essere equipaggiato con un sistema WTORS che è stato installato secondo le specifiche istruzioni del produttore ed è conforme alla regolamentazione ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Sezione 19, mentre la sedia deve avere un kit di sicurezza per il trasporto che sia conforme alla regolamentazione ANSI/RESNA WC/ Vol. 4, Sezione 19.

È importante usare un sistema WTORS completo per assicurare la sedia al veicolo e fornire all'utente un sistema di sicurezza appropriatamente progettato e testato.

È necessario utilizzare un sistema di ritenuta del veicolo con cinture sia pelviche che per la parte superiore del busto per proteggere l'occupante della sedia a rotelle e ridurre al minimo il rischio di lesioni causate da un incidente o una frenata improvvisa.

5. INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L'UTENTE

Questo capitolo contiene informazioni dettagliate riguardo all'esatta configurazione della sedia Motion Composites testata per l'impatto frontale e altri tipi di test da

WC-19. I risultati dei test si applicano solo alla configurazione testata e descritta nel presente documento. Pertanto, se ordinate una sedia differente, come ad esempio una con un sistema di seduta prodotto da qualche altra azienda, dovete tener presente che la sedia non è stata testata per altre configurazioni e non deve essere considerata come "approvata per il trasporto" da Motion Composites. Dato che non sono state testate altre configurazioni, Motion Composites non è a conoscenza delle prestazioni della sedia in queste situazioni.

Per questo motivo, la nostra azienda non fornisce nessuna garanzia sulle prestazioni della sedia nelle configurazioni differenti da quelle descritte in questo documento.

Motion Composites non ha autorizzato nessuno a fornire queste garanzie per suo conto.

6. AVVERTENZE**AVVERTENZA**

Se avete domande sull'uso della sedia per sedersi in un veicolo a motore, dovete contattare il servizio clienti Motion Composites ai numeri: 1-866-650-6555.

**AVVERTENZA**

Questo capitolo contiene informazioni dettagliate riguardo all'esatta configurazione di Sedia a rotelle testata per l'impatto frontale e altri tipi di test da WC-19.

Vedete il capitolo "Configurazione test Sedia a rotelle" Sezione 11. I risultati dei test si applicano solo alla configurazione testata e descritta nel presente documento. Per tanto, se ordinate una sedia con una configurazione differente, come una con un sistema di seduta prodotto da un'altra azienda, dovete tener presente che la sedia non è stata testata in queste configurazioni e che non deve essere considerata come "approvata per il trasporto" da Motion Composites. Dato che le configurazioni differenti non sono state testate, Motion Composites non è a conoscenza delle prestazioni della sedia in queste situazioni.

Per questo motivo, Motion Composites non fornisce nessuna garanzia sulle prestazioni della sedia nelle configurazioni differenti da quelle descritte in questo documento.

Motion Composites non ha autorizzato nessuno a fornire garanzie per suo conto.

**AVVERTENZA**

Sedia a rotelle presenta l'opzione Transit Tie Down che è stata dinamicamente testata con un'orientazione rivolta in avanti in impatti frontali ad una velocità di 30 mph (48 Km/h) con pesi differenti, come indicato nel capitolo *Configurazione Test Sedia a rotelle Sezione 11*. Sedia a rotelle presenta l'opzione Transit Tie Down che rispetta i requisiti di performance per il viaggio con disposizione rivolta in avanti in impatti frontali, e deve essere usata solo quando si è seduti e rivolti in avanti nei veicoli a motore. L'uso in altre orientazioni (per esempio rivolto all'indietro o di lato) non è stato testato, e la sedia non deve essere usata in queste disposizioni.

**AVVERTENZA**

Non salite sulla sedia in un veicolo a motore se il vostro peso, insieme con il peso di tutti gli articoli attaccati alla sedia stessa (come zaini, borse, ecc.), è maggiore di 120 kg

**AVVERTENZA**

Non devono essere fatte alterazioni o sostituzioni ai punti di fissaggio o alle parti e ai componenti strutturali e del telaio. La sedia è stata testata nelle configurazioni con i componenti specificati nel capitolo "Configurazione Test Sedia a rotelle" Sezione 11. Ogni modificazione o sostituzione ai componenti della sedia a rotelle può alterare significativamente la performance durante l'impatto.

- ⚠ AVVERTENZA**
Motion Composites nega espressamente che l'uso dell'opzione di trasporto sulla sedia possa impedire possibili infortuni e la morte all'utente in caso d'incidente..
- ⚠ AVVERTENZA**
Una frenata improvvisa e/o una collisione possono danneggiare strutturalmente la sedia. Questi danni possono non essere visibili. Smettete immediatamente l'uso della sedia se questa è stata coinvolta in un incidente. Dato che il danno strutturale potrebbe non essere visibile, dovete sostituire la sedia che ha subito nell'incidente.
- ⚠ AVVERTENZA**
Quando questo sia possibile, l'utente deve trasferirsi sul sedile del veicolo e usare il sistema di sicurezza originale del produttore, mentre la sedia non occupata deve essere stipata in una zona cargo o assicurata al veicolo durante il viaggio.

USTAE SISTEMI TIE DOWN E USATELI IN MODO APPROPRIATO

- ⚠ AVVERTENZA**
La sedia deve essere usata con il sistema WTORS, il quale rispetta i requisiti della SAE (Society of Automotive Engineers) J2249 Recommended Practice - uso del sistema WTORS in veicoli a motore (SAE J2249). Non usate altri sistemi WTORS progettati sui carichi della struttura della sedia sul veicolo.
- ⚠ AVVERTENZA**
Non usare la sedia con un sistema WTORS, a meno che questo non è stato installato in piena conformità con le istruzioni del produttore del sistema WTORS stesso e con la pratica SAE J2249.
- ⚠ AVVERTENZA**
Installate sempre il sistema WTORS sulla sedia a rotelle su tutte i 4 punti di attacco dell'opzione transito, secondo le istruzioni fornite dai produttori del sistema WTORS stesso e con la pratica SAE J2249.
Nota: osservate la Figura 4 per sapere la collocazione dei 4 punti di fissaggio.
- ⚠ AVVERTENZA**
Fissare SEMPRE l'occupante della sedia a rotelle utilizzando il sistema di ritenuta ancorato al veicolo (cinture pelviche e cinture per la parte superiore del busto), rispettando le istruzioni del produttore di tali sistemi di ritenuta e SAE J2249.

USARE ATTREZZATURE ADEGUATE/USARLE SOLO COME INDICATO

- ⚠ AVVERTENZA**
Dovete sempre usare sedia a rotelle seguendo tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale.
- ⚠ AVVERTENZA**
La sedia a rotelle dotata dell'opzione per il transito di Motion Composites è stata testata dinamicamente in orientamento rivolto in avanti con il manichino di prova antropomorfo specificato trattenuto SIA da una cintura pelvica CHE da una cintura per la parte superiore del busto ancorate al veicolo. SIA le cinture pelviche CHE quelle per la parte superiore del busto (spalle) devono essere utilizzate per ridurre la possibilità di urti della testa e del torace con i componenti del veicolo a motore.

MOTION COMPOSITES RICHIEDE CHE SIA LE CINTURE PELVICHE CHE QUELLE DELLA PARTE SUPERIORE DEL BUSTO ANCORATE AL VEICOLO VENGANO UTILIZZATE PER LA MASSIMA PROTEZIONE IN CASO DI IMPATTO FRONTALE.

- ⚠ AVVERTENZA**
L'angolo dello schienale deve essere regolato sulla vostra sedia Motion Composites. Dovete regolare l'angolo dei braccioli in modo da non eccedere il valore specificato nell'appendice "Divulgazione delle Informazioni" a pagina 24 del manuale Sedia a rotelle, quando la sedia è occupata durante il trasporto in un veicolo a motore.

- ⚠ AVVERTENZA**
I supporti posturali come cinture di posizionamento pelviche o i supporti del tronco anteriori e laterali non devono essere usati come cinture in un veicolo a motore, a meno che non sono etichettati come conformi a WC-19.
- ⚠ AVVERTENZA**
I supporti posturali accessori, come le cinture di posizionamento pelviche, i supporti anteriori e quelli laterali del busto NON dovrebbero essere utilizzati per il contenimento degli occupanti in un veicolo in movimento, a meno che non siano etichettati come conformi a WC-19.
- ⚠ AVVERTENZA**
Quando questo è possibile, le attrezzature ausiliarie devono essere assicurate alla sedia, o rimosse dalla sedia e assicurate al veicolo durante il viaggio, in modo che queste non si liberano e causino infortuni agli occupanti in caso di collisione.
- ⚠ AVVERTENZA**
Per ridurre il rischio d'infortuni per gli occupanti del veicolo, le seguenti azioni devono essere eseguite per i vassoi montati sulla sedia o altri tipi di accessori, come pali, attrezzature respiratorie, zaini e altre articoli personali, non specificatamente progettati per la sicurezza durante gli incidenti: (1) devono essere rimossi e assicurati separatamente nel veicolo, o (ii) devono essere assicurati alla sedia ma posizionati lontano dall'occupante, con un'imbottitura per assorbire l'urto posizionata tra l'accessorio e l'occupante stesso.
- ⚠ AVVERTENZA**
IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE, POTRESTE DANNEGGIARE LA VOSTRA SEDIA, CAUSARE INFORTUNI FISICI AD ALTRE PERSONE E SUBIRE VOI STESSI GRAVI INFORTUNI FISICI, FINO AD INCLUDERE LA MORTE. .

7. ASSICURARE LA SEDIA

NOTA: oltre a seguire le linee guida generali indicate di seguito, assicuratevi di seguire tutte le raccomandazioni e le istruzioni fornite dal produttore WTORS.

Assicurate sempre la sedia e l'occupante in una posizione rivolta in avanti nel veicolo di trasporto.

- ⚠ AVVERTENZA**
Attaccate le 4 cinghie tie down solo ai punti di attacco appositamente progettati e etichettati, indicati dai simboli di ancoraggio sulla sedia. *Vedere figura 1.*

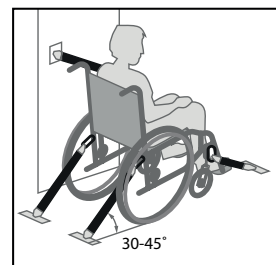


Figure 1. Fixer le fauteuil dans le véhicule

Allacciate le cinghie sufficientemente per rimuovere ogni allentamento. Non attaccate mai le cinture tie down a parti regolabili, mobili o removibili della sedia come braccioli, alberature anteriori e ruote.

Posizionate i punti di ancoraggio per le cinghie tie-down posteriori direttamente dietro i punti di attacco posteriori sulla sedia. Le cinghie tie-down anteriori devono ancorare i punti sul pavimento distanziati in maniera tale da fornire una maggiore stabilità laterale. *Vedere figura 2.*

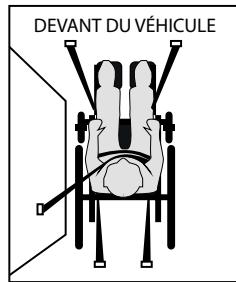


Figure 2. Fixer le fauteuil dans le véhicule

AVVERTENZA
 Tenere sempre delle zone libere adeguate quando si fissa una sedia a rotelle occupata in un veicolo a motore. La zona libera frontale (FCZ) è misurata dal punto più anteriore sulla testa dell'occupante e dovrebbe misurare almeno 26 pollici (66 cm) se vengono utilizzate sia una cintura pelvica che una cintura per la parte superiore del tronco ancorate al veicolo. *Vedere figura 3.*

NOTA: la zona sgombra frontale raccomandata potrebbe non essere raggiungibile per gli utenti del veicolo seduti sulla sedia a rotelle.

La zona sgombra posteriore è misurata dal punto più posteriore sulla testa dell'occupante e deve misurare almeno 16 pollici (40.64 cm). *Osservate la figura 3.*

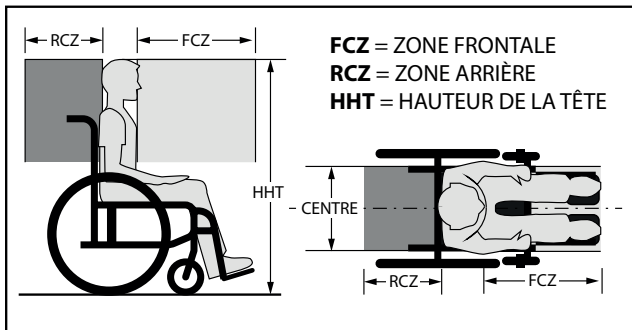



Figure 3

L'altezza della testa da seduti (HHT) varia da circa 47 pollici (120 cm) per una donna adulta a circa 61 pollici (155 cm) per un uomo adulto. *Osservate la figura 3.*

AVVERTENZA
 Create il più ampio spazio sgombro possibile intorno all'occupante della sedia a rotelle, in modo da ridurre il rischio di contatto con i componenti del veicolo e con altri passeggeri in caso d'incidente.

AVVERTENZA
 Assicuratevi che tutti i componenti del veicolo vicini all'occupante della sedia a rotelle siano rimossi o coperti con una densa imbottitura.

KIT TRANSIT TIE-DOWN DI MOTION COMPOSITES

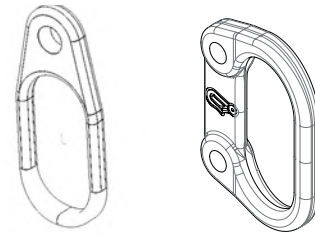

Tie Down Posteriore

Tie Down Anteriore

Il kit Transit Tie-Down include i punti di ancoraggio della cintura conformi a ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Sezione 19.

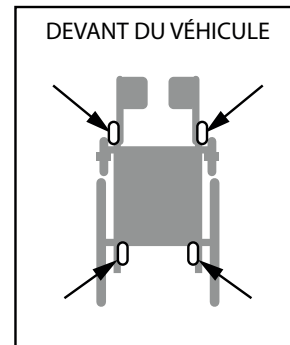


Figure 4. Emplacement des ancrages

8. ASSICURARE L'OCCUPANTE DELLA SEDIA A ROTELLE

Una volta che la sedia è stata assicurata in modo appropriato, è importante che l'occupante della sedia sia protetto per il trasporto.

AVVERTENZA
 La cintura pelvica deve essere inclinata tra 45 e 75 gradi rispetto all'asse orizzontale quando viene osservata di lato. Tuttavia, se l'utente non può rispettare questa regola, può essere utilizzata in modo sicuro l'alternativa tra i 30 e i 45 gradi. Alcuni componenti della sedia a rotelle, come i braccioli e le ruote, possono interferire con l'appropriato adattamento della cintura. Potrebbe essere necessario inserire una cintura tra il bracciolo e lo schienale, o attraverso un'apertura tra lo schienale e il sedile, in modo da evitare di disporre una cintura pelvica sul bracciolo. *Osservate la figura 5.*

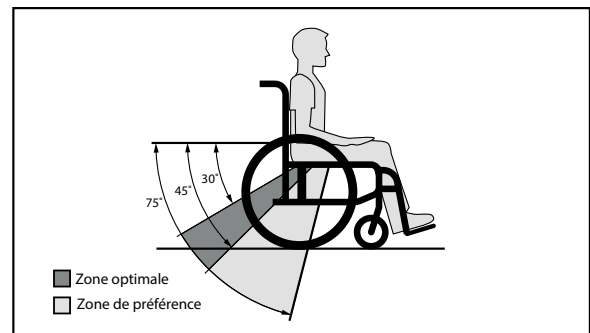


Figure 5. Angle recommandé de la position de la ceinture pelvienne

AVVERTENZA
L'occupante della sedia deve essere assicurato con cinture pelviche o cinture per la parte posteriore del dorso che sono state dinamicamente testate e approvate, o con un'imbracatura a cinque punte come il sistema WTORS. Posizionate la cintura pelvica sulla pelvi vicino alle parti superiori delle cosce, facendo attenzione a non arrivare all'addome. Posizionare la cintura della parte alta del torso sulla parte centrale delle spalle e del torso stesso, e collegatela alla cintura pelvica vicino al fianco dell'occupante. *Osservate la figura 6.*

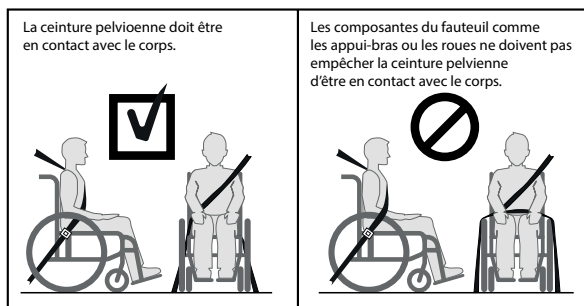


Figure 6. Position adéquate de la ceinture pelvienne

AVVERTENZA
L'occupante della sedia deve essere assicurato con cinture pelviche o cinture per la parte posteriore del dorso che sono state dinamicamente testate e approvate, o con un'imbracatura a cinque punte come il sistema WTORS. Posizionate la cintura pelvica sulla pelvi vicino alle parti superiori delle cosce, facendo attenzione a non arrivare all'addome. Posizionare la cintura della parte alta del torso sulla parte centrale delle spalle e del torso stesso, e collegatela alla cintura pelvica vicino al fianco dell'occupante. *Osservate la figura 6.*

AVVERTENZA
La cintura della parte alta del torso non deve essere indossata ritorta, in modo da ridurre l'area di contatto della cintura stessa con l'occupante. I punti di ancoraggio della cintura del torso superiore non devono essere ancorati sopra e dietro la parte superiore delle spalle dell'occupante, per far in modo che l'occupante sia assicurato in modo appropriato durante il trasporto. Sia le cinture pelviche sia le cinture del torso devono essere regolate il più strettamente possibile senza compromettere il comfort dell'utente. *Osservate la figura 7.*

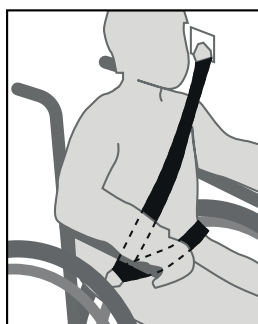


Figure 7. Position de la ceinture du torse

AVVERTENZA
La fibbia dei sistemi di cinture di sicurezza non deve essere posizionata vicino ai componenti della sedia che potrebbero entrare in contatto con il pulsante di rilascio della fibbia stessa in caso d'incidente o collisione. Se la vostra sedia è equipaggiata con una cintura pelvica testata che è ancorata al telaio, completate il sistema di sicurezza attaccando l'estremità inferiore della cintura WTOTS per il torso alla cintura pelvica seguendo le istruzioni del produttore. Le cinture pelviche ancorate alla sedia e testate saranno etichettate per indicare la conformità con il regolamento ANSI/RESNA WC/Vol 4, Sezione 19. *Osservate la figura 8 e 9.*

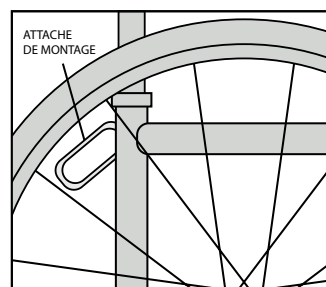


Figure 8. Attache de montage de la ceinture du fauteuil roulant

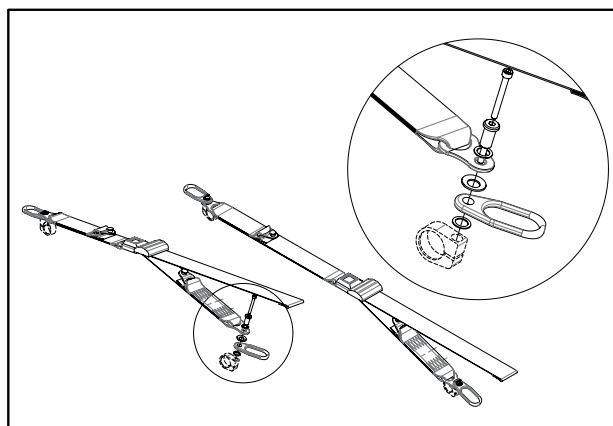


Figure 9. Système d'ancrage de la ceinture du fauteuil roulant

OBBLIGATORIO
Il sistema di cinture di sicurezza del veicolo conforme allo standard ANSI/RESNA WC/Vol 4, Sezione 19 deve essere utilizzato se l'occupante sceglie di non utilizzare un sistema di sicurezza della sedia installato dal produttore.

AVVERTENZA
Sebbene supporti posturali e cinture di posizionamento possano essere utilizzati in un veicolo in movimento in aggiunta al sistema di ritenuta del veicolo, non si dovrebbe fare affidamento su di essi come sostenuti del sistema di ritenuta del veicolo che è stato progettato e testato a tale scopo, inoltre non dovrebbero interferire con il corretto posizionamento del sistema di ritenuta della cintura del veicolo.

9. KIT FISSAGGIO DURANTE IL TRASPORTO

I seguenti componenti per il kit di fissaggio durante il trasporto devono essere conformi allo standard ANSI/RESNA WC/Vol. 1, Sezione 18 (precedentemente indicato come SA J2249) e devono essere installati secondo le istruzioni del produttore.

- Sistema WTORS (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System)
- Sistema di ancoraggio della sedia a rotelle in 4 punti per il transito con cinture di sicurezza per gli occupanti in 3 punti.
- Tie-down e giunzioni
- Punti di ancoraggio WTORS
- Punti di ancoraggio per le cinture dell'occupante

NOTA: per ottenere una copia dello standard ANSI/RESNA WC/Vol. 1, Sezione 18 e/o 19 visitate il sito web <http://www.ansi.org>.

10. PUNTI IMPORTANTI DA RICORDARE



OBBLIGATORIO

Leggete e seguite le istruzioni del produttore, incluso il suo manuale.



OBBLIGATORIO

Ogni sistema WTORS o ogni sedia a rotelle coinvolta in un incidente deve essere sostituita.



AVVERTENZA

Lo schienale della sedia deve essere posizionato a un angolo di non più di 20 gradi rispetto all'asse verticale. Se viene richiesto un angolo più grande, il punto di ancoraggio della cintura per il torso superiore deve essere spostato all'indietro lungo la parete laterale del veicolo, per assicurare che la cintura mantenga il contatto con le spalle e il torso dell'occupante.



AVVERTENZA

Fate regolarmente un controllo visivo di tutte le apparecchiature WTORS secondo le istruzioni del produttore, e fate sostituire immediatamente i componenti consumati e rotti. Assicuratevi che la pista di ancoraggio sia libera da sporco e detriti.



AVVERTENZA

Rimuovete i vassoi rigidi e metteteli via o assicuratevi in un altro punto del veicolo, per ridurre il rischio d'infortuni per l'occupante della sedia dovuto al contatto con i vassoi stessi.



AVVERTENZA

Considerate l'uso dei vassoi di schiuma al posto di quelli rigidi durante il trasporto in un veicolo a motore. Se questo non è possibile, applicate un'imbottitura di schiuma densa tra l'occupante della sedia e il vassoio stesso, e assicuratevi che quest'ultimo sia attaccato in modo sicuro alla sedia da non liberarsi e causare infortuni agli altri occupanti in caso d'incidente.



AVVERTENZA

Assicuratevi che l'occupante della sedia sia posizionato in modo appropriato per proteggere il collo durante un impatto posteriore.



AVVERTENZA

Assicurate tutti gli accessori rimovibili, incluso indumenti di protezione, attrezzature mediche e altre attrezzature, alla sedia a rotelle o al veicolo a motore, per prevenire gli infortuni in caso d'incidente.



AVVERTENZA

Se si richiede il supporto della testa e del collo durante il viaggio, usate collari soffici e leggeri, in quanto questi causano con minore probabilità infortuni al collo in un incidente. Non attaccare il collare alla sedia o al sistema di seduta.

11. TEST DI CONFIGURAZIONE

Larghezza del sedile.....	18 pollici
Profondità del sedile	18 pollici
Altezza parte posteriore del sedile.....	20 pollici
Altezza anteriore del sedile	18 pollici
Altezza posteriore del sedile	15,75 pollici
Angolo del sedile	7 gradi
Angolo posteriore del sedile.....	90 gradi on una curvatura di 8 gradi a 8 pollici
Peso sedia a rotelle	37 libbre
Tensione imbracatura sedile	regolabile
Fodera posteriore	regolabile
Altezza regolabile schienale in alluminio.....	18-21 pollici
Angolo poggiatesta	70 gradi
Ruote posteriori a	24 raggi con 0 gradi di campanatura
Gomma posteriore soffice in uretano	1,25 pollici
Rotelle da 6" con gomma in poliuretano su una ruota in materiale composito a 3 raggi	
Angolo regolabile	poggiatesta in alluminio
Altre opzioni	nessuna
Massa di ATD	172 libbre
Peso massimo dell'utente	265 libbre

TABELLA DI CONVERSIONE

POLLICI	METRICO	POLLICI	METRICO	POLLICI	METRICO	POLLICI	METRICO
0,25"	0,6 cm	1"	2,5 cm	10"	25,4 cm	19"	48,3 cm
0,5"	1,3 cm	2"	5,0 cm	11"	28,0 cm	20"	50,8 cm
0,75"	2,0 cm	3"	7,6 cm	12"	30,5 cm	21"	53,3 cm
		4"	10,2 cm	13"	33,0 cm	22"	55,9 cm
		5"	12,7 cm	14"	35,6 cm	23"	58,4 cm
		6"	15,2 cm	15"	38,1 cm	24"	61,0 cm
		7"	17,8 cm	16"	40,6 cm	25"	63,5 cm
		8"	20,3 cm	17"	43,2 cm	26"	66,0 cm
		9"	22,9 cm	18"	45,7 cm		

MOTION COMPOSITES

160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan
Quebec, Canada
J0K 3H0 Canada

Telefono: 1-866-650-6555

Fax: 1-888-966-6555

support@motioncomposites.com

www.motioncomposites.com