

Istruzioni per l'uso del kit di cunei CAM sul cuscino Forward

USO SIMMETRICO

Utilizzare i cunei CAM **simmetricamente** per promuovere una postura più eretta e diminuire la pressione ischiatica. Massimo due cunei per lato.



I cunei CAM sono disponibili come accessori

USO ASIMMETRICO

Utilizzare i cunei CAM **asimmetricamente** per aiutare a livellare un'obliquità pelvica flessibile. Massimo due cunei per lato.



Obliquità pelvica non corretta su cuscino Forward.



Obliquità pelvica parzialmente corretta su cuscino Forward con l'uso di 1 cuneo CAM sul lato basso



Obliquità pelvica corretta su cuscino Forward con l'uso di 2 cunei CAM sul lato basso.