

# Montaggio Cinture



## CINTURA

Scegliere tra una cintura a due o quattro punti, o una Evoflex

+



## ATTACCHI

Mantiene in posizione di montaggio la cinghia (non necessari per Evoflex)

+



## HARDWARE

Aggiungere se necessario per montare gli attacchi o le cinghie Evoflex sulla carrozzina

=



Ogni combinazione di prodotti è testata secondo gli standard ISO, ANSI/RESNA e CEN.

1

## SELEZIONA LA CINTURA

2

## SCEGLI GLI ATTACCHI



### Flat

Versatile e a basso profilo per spazi ristretti (ad esempio, tra le ruote e il telaio)

Fori dimensionati per viti di montaggio da 6 mm (non incluse)



### Cinch

Consente una regolazione rapida, facile e precisa della lunghezza della cinghia in base alle variazioni di peso e di abbigliamento.

Fori dimensionati per viti di montaggio da 6 mm (non incluse).

3

## IDENTIFICA IL TIPO DI TELAIO, LE DIMENSIONI, I PUNTI DI MONTAGGIO DESIDERATI

### Tool rileva diametri

**BO-BMR-42**

Aiuta a misurare rapidamente le dimensioni dei telai e i diametri dei dispositivi di fissaggio




Misurare il diametro dei tubi




Misurare l'altezza del binario


### Tipi Telai

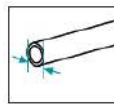


**(A) Tondo**  
Ø19, 22, 25, 29, 30, 32mm

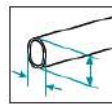


**(B) Ovale**  
Quickie  
27mm X 33mm

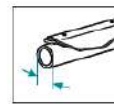


**(C) Tubo**  
Fori per il telino seduta sulla parte superiore

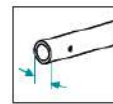

**(D) Tubo**  
Fori filettati laterali

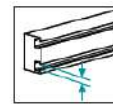

**(E) Binario a T da 6 mm**  
Permobil e Netti

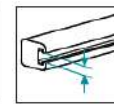

**(F) Binario a T da 10 mm**  
Invacare e Quantum

4

## AGGIUNGI HARDWARE DI MONTAGGIO OPZIONALE

### Salvatelaio in nylon

**BO-HW303**

Tipo telaio: **A, D**

Adatto a tubi da: Ø22mm e 25mm; Riduttore da Ø19mm disponibile separatamente (BO-HW303-19SHIM)



Su tubo da 25mm



Con attacco Flat

### Piastre di montaggio su tubi seduta

**BO-HW200-20**

Tipo telaio: **D**

Inclinate a 20°



Inclinate a 20° per montaggio laterale

Inclinate a 90° per montaggio dall'alto



Montaggio Evoflex su telino seduta

### Morsetti telaio in alluminio

**BO-HW310**

Tipo telaio: **A, C**

Adatto a tubi da: Ø22mm e 25mm



Sotto al telino




Su sedia da doccia

### Elementi di fissaggio per binari a T

**BO-HKA6-12MM/BO-HKA6-14MM**

Tipo telaio: **E**

6 mm

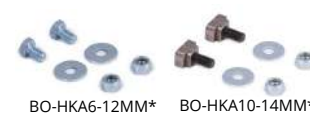

BO-HKA6-12MM\*

BO-HKA6-14MM\*



Con attacco Cinch

**BO-HKA10-14MM/BO-HKA10-19MM**

Tipo telaio: **F**

10 mm

\*Le misure indicate sono per raccordi terminali in metallo e Evoflex. Per i raccordi di plastica, utilizzare HKA6-14MM o HKA10-19MM.

### Morsetti a fascia in acciaio inox

**BO-HW320**

Tipo telaio: **A, B, C, D**

Adatto a tubi da: Ø22mm, 25mm, 29mm, 30mm, 32mm, 27mm X 33mm



Sotto al telino



Con Evoflex

### Estensioni Evoflex

**BO-EBE100**

Allunga Evoflex fino a 12,5 cm per lato



Installate ed attaccate ad Evoflex



Piegate a caldo per essere montate sotto alla seduta

Tutti i componenti di montaggio sono dimensionati per viti da 6 mm, se non diversamente indicato.